



PRODUCTOS
PREVENTIVOS
Y TERAPÉUTICOS

**Medias
de compresión
decreciente**

Viadol!®



Viadol®

Soluciones eficaces
para el problema más común



PRODUCTOS
PREVENTIVOS
Y TERAPÉUTICOS

**Medias
de compresión
decreciente**

nueva línea
de medias
de compresión
decreciente

Viadol



Varices y venas varicosas

¿Qué son las venas varicosas?

Las venas varicosas son venas situadas justo debajo de la piel que se vuelven muy grandes, retorcidas y abultadas. Por regla general están en las piernas.

- Las venas varicosas son más frecuentes en las mujeres y, a menudo, comienzan a producirse durante el embarazo, aunque también aparecen en hombres.
- Los tratamientos permiten a veces deshacerse de ellas, aunque a menudo aparecen nuevas venas varicosas.

¿Cuál es la causa de las varices (venas varicosas)?

Por lo general ocurren cuando las paredes de las venas son débiles. Las venas se estiran, se retuercen y se dilatan (se ensanchan). Las varices pueden ser hereditarias y pueden empeorar cuando:


- Se aumenta de peso o en casos de obesidad.
- Se está mucho tiempo de pie.
- Al envejecer.

¿Cuáles son los síntomas de las venas varicosas?

Las venas varicosas se presentan como protuberancias en forma de serpiente justo debajo de la piel. Pueden causar:

- Dolor.
- Sensación de cansancio en las piernas.
- Picor en piernas o tobillos.

Si se tienen venas varicosas, también se pueden tener arañas varicosas.

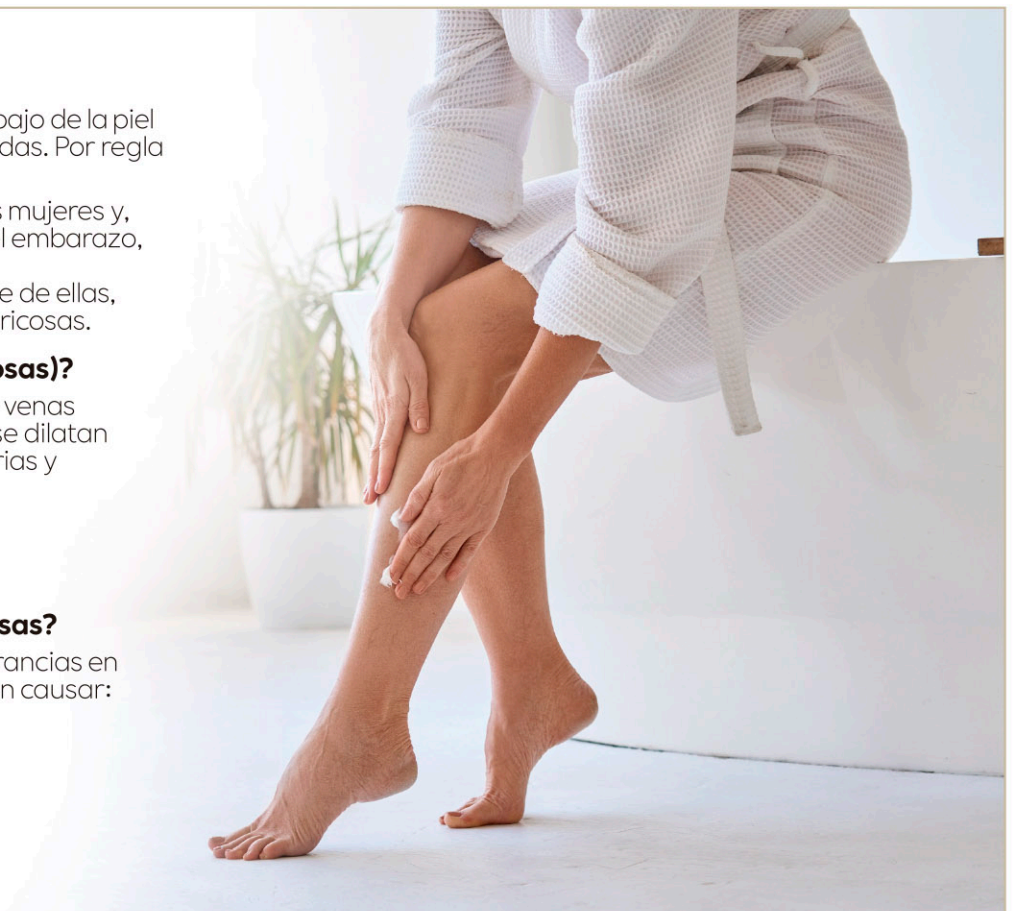


¿Cómo puede Viadol® ayudarte a tratar los problemas de circulación de tus pacientes?



Viadol® es una gama completa de medias bielásticas de compresión decreciente, de gran elasticidad y forma anatómica, que cumplen las posibles indicaciones terapéuticas y profiláctico-preventivas.

Las medias de compresión decreciente son el método más antiguo de **curación de la enfermedad varicosa y linfática** y son **fundamentales durante la terapia médica, postoperatorios, y en la terapia esclerosante. Previenen, retrasan o evitan la aparición de la enfermedad**, mientras que en una etapa más avanzada, reducen las complicaciones de úlceras y flebitis.

Facilitan el retorno de la sangre venosa desde los tobillos hacia los muslos, contribuyendo a que la sangre mantenga un flujo ascendente y no se produzca el retroceso de la misma.

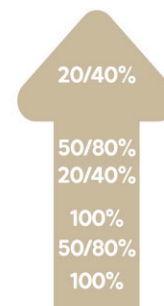

DENIERS

- El denier no es una unidad de compresión
- Señala el diámetro del hilado empleado para tejer las medias, pantys y calcetines.
- Cuanto menor es el valor de denier, más ligero y transparente será el panty.
- A mayor valor en deniers, más compacto, sólido y resistente será el género de punto, haciendo que sea menos transparente.

Las medias **Viadol®** ofrecen en 3 tipos de deniers:

- **DEN 280 – Compresión Fuerte**
- **DEN 140 – Compresión Normal**
- **DEN 70 – Compresión Ligera**

PRODUCTOS
PREVENTIVOS
Y TERAPÉUTICOS

**Medias
de compresión
decreciente**

Viadol



Prevención, recuperación y curación

Medias según el grado de varicosis

Las medias Viadol® ofrecen 3 tipos de compresión:


Medias de compresión ligera

- También conocidas como medias de descanso, son aquellas que ejercen una compresión de 18 a 21 milímetros de mercurio (mm Hg).
- Se utilizan en personas que noten pesadez o cansancio en las piernas.
- Mujeres embarazadas o en quienes deben permanecer mucho tiempo sentado o de pie.
- Son la mejor medida para prevenir la aparición de varices.




Medias de compresión moderada o normal

- Ejercen una presión mayor en la pierna, que va de 22 a 29 mm Hg.
- Se utilizan en casos de varices leves a moderadas, en especial si hay hinchazón del tobillo.
- Cuando se aprecia varicosis del embarazo de mediana gravedad.

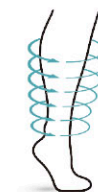

Medias de compresión fuerte

- Ejercen una presión fuerte, por encima de los 30 mm Hg.
- Se usan para varices severas o cuando hay complicaciones como los cambios en la piel (enrojecimiento u oscurecimiento) o la aparición de úlceras varicosas.
- Tras la curación de úlceras varicosas graves.

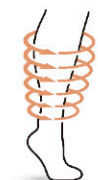



Viadol®

PRODUCTOS
PREVENTIVOS
Y TERAPÉUTICOS

**Medias
de compresión
decreciente**

nueva línea
de medias
de compresión
decreciente

Viadol



Medias Compresión fuerte

30/40 mmHg
DEN 280

**PRODUCTO REEMBOLSADO
POR SEGURIDAD SOCIAL
(cupón precinto)**

Indicaciones:

- Estados consecutivos a una insuficiencia venosa, constitucional o post-trombótica
- Fuerte tendencia al edema
- Varicosis secundaria
- Atrofia blanca
- Dermatoesclerosis
- Tras la curación de úlceras varicosas graves



Media
entera
Varidol



Media
larga
Viadol



Media
corta
Viadol



Media larga
con blanda
Maries



Viadol®

PRODUCTOS
PREVENTIVOS
Y TERAPÉUTICOS

**Medias
de compresión
decreciente**

nueva línea
de medias
de compresión
decreciente

Viadol



Medias Compresión normal

22/29 mmHg
DEN 140

**DISPENSABLE POR
SEGURIDAD SOCIAL
CON VISADO
DE INSPECCIÓN**

Indicaciones:


- Sensación de pesadez o cansancio en las piernas y molestias intensas
- Varicosis acusadas con tendencia al edema
- Tumefacciones post-traumáticas
- Tras curación de úlceras varicosas leves
- Después de tromboflebitis superficiales
- Después del tratamiento esclerosante y quirúrgico de varices
- Varicosis incipientes del embarazo



Media entera
(panty)



Media
larga

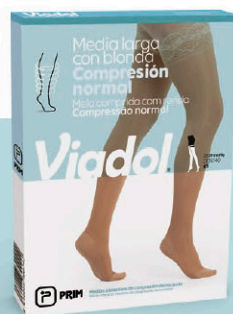

Media larga
con blonda



Media
corta



Calcetín
caballero



Media larga
caballero



Viadol®

PRODUCTOS
PREVENTIVOS
Y TERAPÉUTICOS

**Medias
de compresión
decreciente**

nueva línea
de medias
de compresión
decreciente

Viadol



Medias Compresión ligera

18/21 mmHg

DEN 70

VENTA LIBRE

Indicaciones:

- Sensación de pesadez o cansancio en las piernas
- Varicosis ligeras sin tendencia al edema
- Varicosis incipientes del embarazo



Media entera
(panty)



Media larga
con blonda



Media
corta

La elección del tipo de media

Viadol® dispone de una gran variedad de tipos de medias y calcetines.



Panty
Media
Entera

Media Larga
con Blonda

Media
Larga

Media
Corta

Media
Larga
Caballero

Calcetín

Medias según la localización de varices

La localización de las varices es un factor importante a la hora de elegir qué tipo de medias son las más adecuadas. Podemos encontrar varices a nivel del tobillo, en la pierna, detrás de la rodilla o bien en toda la pierna incluyendo el muslo. Para cubrir todas las necesidades, Viadol® ofrece 3 tipos de medias:

Medias cortas

- Llegan hasta la altura de la rodilla.
- Indicadas en las varices leves o que se localicen solo a nivel de la pierna.



Medias largas

- Llegan más arriba de la rodilla, pueden cubrir parte del muslo o su totalidad.
- Son el tipo de medias más cómodas.
- Son útiles cuando las varices se ubican por detrás de las rodillas o llegan a la parte inferior del muslo. Por lo general se sujetan por bandas de silicona o bien mediante ligas.



Medias enteras (tipo panty)

- Abarcan toda la pierna llegando hasta la cintura y sujetándose al abdomen.
- Están indicadas cuando las varices abarcan toda la pierna.



PRODUCTOS
PREVENTIVOS
Y TERAPÉUTICOS

**Medias
de compresión
decreciente**

Viadol




Toma de medidas

El momento ideal para realizar la medición es por la mañana al levantarse, o al menos tras haber estado unos 20 minutos con las piernas elevadas para que no estén hinchados los tobillos.

Las medidas se toman en posición de pie, por lo que es conveniente disponer de la ayuda de otra persona.


Cada media lleva una tabla asociada con las mediciones necesarias para que el ajuste final sea óptimo.

Si la medición se encuentra entre dos tallas, ha de elegirse la superior.

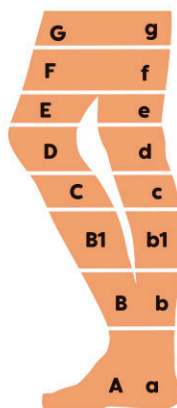




Tallas		Pequeña IIS	Mediana III M	Grande IV L	XGrande V XL				
Anchura en cm.	b	20	21	22	23	24	25	26	27
	b1	25,5	26,5	27,5	29	30	31,5	32,5	34
	c	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42
	d	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40
	e	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43
	f	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53
	g	46	48	50	52	54	56	58	60
Longitud en cm.	A-B	11	11	12	12	12	12	13	13
	A-B1	19	19	20	20	21	21	21	21
	A-C	26	26	27	27	27	28	28	28
	A-D	38	38	39	39	40	40	41	41
	A-E	43	43	44	46	47	48	49	49
	A-F	57	57	59	61	62	64	65	65
	A-G	68	68	71	73	75	76	78	78

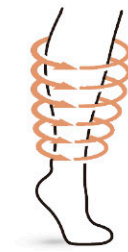Medias **Compresión fuerte**



Viadol® Media larga



C.N.	C.I.	Ref.	EAN	Descripción
● 443853.6	734428	10012182	 8 470004 438536	VIADOL MEDIA LARGA (A-F) TALLA PEQUEÑA II S
● 443861.1	734429	10012183	 8 470004 438611	VIADOL MEDIA LARGA (A-F) TALLA MEDIANA III M
● 443879.6	734430	10012184	 8 470004 438796	VIADOL MEDIA LARGA (A-F) TALLA GRANDE IV L
● 443887.1	734431	10012185	 8 470004 438871	VIADOL MEDIA LARGA (A-F) TALLA XGRANDE V XL

Maries® Media larga con blonda



C.N.	C.I.	Ref.	EAN	Descripción
● 496422.6	734653	20012082	 8 470004 964226	MARIES MEDIA LARGA CON BLONDA (A-F) TALLA PEQUEÑA II S
● 496430.1	734654	20012083	 8 470004 964301	MARIES MEDIA LARGA CON BLONDA (A-F) TALLA MEDIANA III M
● 496448.6	734655	20012084	 8 470004 964486	MARIES MEDIA LARGA CON BLONDA (A-F) TALLA GRANDE IV L
● 496455.4	734656	20012085	 8 470004 964554	MARIES MEDIA LARGA CON BLONDA (A-F) TALLA XGRANDE V XL
● 499988.4	826646	20012086	 8 434048 370900	MARIES MEDIA LARGA CON BLONDA (A-F) TALLA REINA VI

Indicaciones:

- Estados consecutivos a una insuficiencia venosa, constitucional o post-trombótica
- Fuerte tendencia al edema
- Varicosis secundaria
- Atrofia blanca
- Dermatoesclerosis
- Tras la curación de úlceras varicosas graves




nueva línea
de medias
de compresión
decreciente

Viadol®




Tallas Pequeña Mediana Grande XGrande

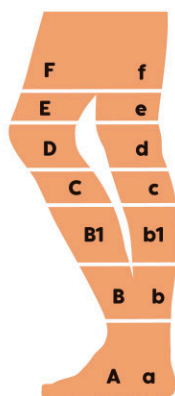

		IIS		III M		IV L		V XL	
Anchura en cm.	b	20	21	22	23	24	25	26	27
	b1	25,5	26,5	27,5	29	30	31,5	32,5	34
	c	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42
	d	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40
	e	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43
	f	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53
Longitud en cm.	A-B	11	11	12	12	12	12	13	13
	A-B1	19	19	20	20	21	21	21	21
	A-C	26	26	27	27	27	28	28	28
	A-D	38	38	39	39	40	40	41	41
	A-E	43	43	44	46	47	48	49	49
	A-F	57	57	59	61	62	64	65	65

A es el suelo // AF: longitud entre el suelo y el punto F (medio mulso)

Tallas Pequeña Mediana Grande XGrande Reina

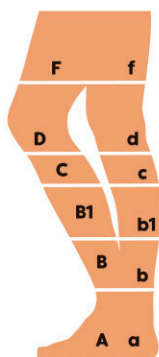


		IIS		III M		IV L		V XL		VI	
Anchura en cm.	b	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	b1	25,5	26,5	27,5	29	30	31,5	32,5	34	36	38
	c	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42	44	46
	d	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	43	45
	f	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	57	59
Longitud en cm.	A-B	11	11	12	12	12	12	13	13	11	11
	A-B1	19	19	20	20	21	21	21	21	19	19
	A-C	26	26	27	27	27	28	28	28	26	26
	A-D	38	38	39	39	40	40	41	41	38	38
	A-E	57	57	59	61	62	64	65	65	57	57

A es el suelo // AF: longitud entre el suelo y el punto F (medio mulso)



Medias **Compresión fuerte**

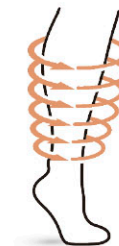

Varidol® Media entera



C.N.	C.I.	Ref.	EAN	Descripción
● 458281.9	734436	10012882	 8 470004 582819	VARIDOL MEDIA ENTERA (E-T) TALLA PEQUEÑA II S
● 458299.4	734437	10012883	 8 470004 582994	VARIDOL MEDIA ENTERA (E-T) TALLA MEDIANA III M
● 458307.6	734438	10012884	 8 470004 583076	VARIDOL MEDIA ENTERA (E-T) TALLA GRANDE IV L
● 458315.1	734439	10012885	 8 470004 583151	VARIDOL MEDIA ENTERA (E-T) TALLA XGRANDE V XL

Viadol® Media corta



C.N.	C.I.	Ref.	EAN	Descripción
● 443812.3	734432	10012482	 8 470004 438123	VIADOL MEDIA CORTA (A-D) TALLA PEQUEÑA II S
● 443820.8	734433	10012483	 8 470004 438208	VIADOL MEDIA CORTA (A-D) TALLA MEDIANA III M
● 443838.3	734434	10012484	 8 470004 438383	VIADOL MEDIA CORTA (A-D) TALLA GRANDE IV L
● 443846.8	734435	10012485	 8 470004 438468	VIADOL MEDIA CORTA (A-D) TALLA XGRANDE V XL

Indicaciones:

- Estados consecutivos a una insuficiencia venosa, constitucional o post-trombótica
- Fuerte tendencia al edema
- Varicosis secundaria
- Atrofia blanca
- Dermatoesclerosis
- Tras la curación de úlceras varicosas graves




nueva línea
de medias
de compresión
decreciente

Viadol®



Tallas Pequeña Mediana Grande XGrande

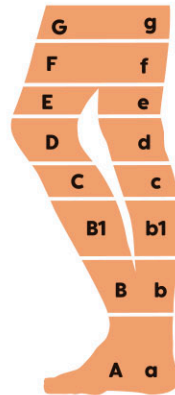

	IIS		III M		IV L		V XL		
Anchura en cm.	b	20	21	22	23	24	25	26	27
	b1	25,5	26,5	27,5	29	30	31,5	32,5	34
	c	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42
	d	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40
	e	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43
	f	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53
	g	46	48	50	52	54	56	58	60
	Longitud en cm.	A-B	11	11	12	12	12	12	13
A-B1		19	19	20	20	21	21	21	21
A-C		26	26	27	27	27	28	28	28
A-D		38	38	39	39	40	40	41	41
A-E		43	43	44	46	47	48	49	49
A-F		57	57	59	61	62	64	65	65
A-G		68	68	71	73	75	76	78	78


A es el suelo

AG: Longitud entre el suelo y el punto G

(la parte superior del muslo, justo debajo de la entrepierna)



Tallas Pequeña Mediana Grande XGrande

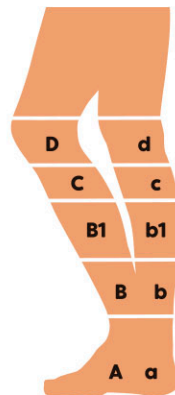


	IIS		III M		IV L		V XL		
Anchura en cm.	b	20	21	22	23	24	25	26	27
	b1	25,5	26,5	27,5	29	30	31,5	32,5	34
	c	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42
	d	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40
Longitud en cm.	A-B	11	11	12	12	12	12	13	13
	A-B1	19	19	20	20	21	21	21	21
	A-C	26	26	27	27	27	28	28	28
	A-D	38	38	39	39	40	40	41	41

A es el suelo

AD: Longitud entre el suelo y el punto D (Rodilla)

Medias **Compresión normal**

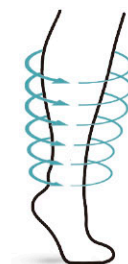

Viadol® Media entera



C.N.	C.I.	Ref.	EAN	Descripción
● 209353.9	734453	10014082	 8 470002 093539	VIADOL MEDIA ENTERA (E-T) BEIGE TALLA PEQUEÑA II S
● 209361.4	734454	10014083	 8 470002 093614	VIADOL MEDIA ENTERA (E-T) BEIGE TALLA MEDIANA III M
● 209379.9	734455	10014084	 8 470002 093799	VIADOL MEDIA ENTERA (E-T) BEIGE TALLA GRANDE IV L
● 209387.4	734456	10014085	 8 470002 093874	VIADOL MEDIA ENTERA (E-T) BEIGE TALLA XGRANDE V XL
● 325258.4	734457	10014086	 8 470003 252584	VIADOL MEDIA ENTERA (E-T) BEIGE TALLA REINA VI
● 325191.4	734448	10014062	 8 470003 251914	VIADOL MEDIA ENTERA (E-T) NEGRA TALLA PEQUEÑA II S
● 325183.9	734449	10014063	 8 470003 251839	VIADOL MEDIA ENTERA (E-T) NEGRA TALLA MEDIANA III M
● 325175.4	734450	10014064	 8 470003 251754	VIADOL MEDIA ENTERA (E-T) NEGRA TALLA GRANDE IV L
● 325167.9	734451	10014065	 8 470003 251679	VIADOL MEDIA ENTERA (E-T) NEGRA TALLA XGRANDE V XL
● 325159.4	734452	10014066	 8 470003 251594	VIADOL MEDIA ENTERA (E-T) NEGRA TALLA REINA VI

Indicaciones:


- Sensación de pesadez o cansancio en las piernas y molestias intensas
- Varicosis acusadas con tendencia al edema
- Tumefacciones post-traumáticas
- Tras curación de úlceras varicosas leves
- Después de tromboflebitis superficiales
- Después del tratamiento esclerosante y quirúrgico de varices
- Varicosis incipientes del embarazo



nueva línea
de medias
de compresión
decreciente

Viadol®


Tallas	Pequeña	Mediana	Grande	XGrande	Reina						
	II S	III M	IV L	V XL	VI XXL						
Anchura en cm.	b	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	b1	25,5	26,5	27,5	29	30	31,5	32,5	34	35	36,5
	c	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45
	d	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43
	f	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	57
	g	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
	Longitud en cm.	A-B	11	11	12	12	12	12	13	13	13
A-B1		19	19	20	20	21	21	21	21	21	21
A-C		26	26	27	27	27	28	28	28	28	29
A-D		38	38	39	39	40	40	41	41	41	42
A-F		57	57	59	61	62	64	65	65	66	66
A-G		68	68	71	73	75	76	78	78	79	79

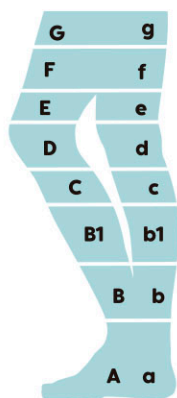

A es el suelo
AG: Longitud entre el suelo y el punto G
(la parte superior del muslo, justo debajo de la entrepierna)





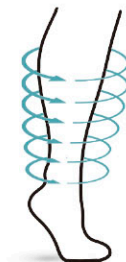

Medias **Compresión normal**



Viadol® Media larga



C.N.	C.I.	Ref.	EAN	Descripción
● 209395.9	734458	10014182	 8 470002 093959	VIADOL MEDIA LARGA (A-F) BEIGE TALLA PEQUEÑA II S
● 209403.1	734459	10014183	 8 470002 094031	VIADOL MEDIA LARGA (A-F) BEIGE TALLA MEDIANA III M
● 209411.6	734460	10014184	 8 470002 094116	VIADOL MEDIA LARGA (A-F) BEIGE TALLA GRANDE IV L
● 209429.1	734461	10014185	 8 470002 094291	VIADOL MEDIA LARGA (A-F) BEIGE TALLA XGRANDE VI XL

Indicaciones:

- Sensación de pesadez o cansancio en las piernas y molestias intensas
- Varicosis acusadas con tendencia al edema
- Tumefacciones post-traumáticas
- Tras curación de úlceras varicosas leves
- Después de tromboflebitis superficiales
- Después del tratamiento esclerosante y quirúrgico de varices
- Varicosis incipientes del embarazo



nueva línea
de medias
de compresión
decreciente

Viadol®

Tallas Pequeña Mediana Grande XGrande

		II S		III M		IV L		V XL		
	Anchura en cm.	b	20	21	22	23	24	25	26	27
		b1	25,5	26,5	27,5	29	30	31,5	32,5	34
		c	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42
		d	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40
		f	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53
Longitud en cm.	A-B	11	11	12	12	12	12	13	13	
	A-B₁	19	19	20	20	21	21	21	21	
	A-C	26	26	27	27	27	28	28	28	
	A-D	38	38	39	39	40	40	41	41	
	A-F	57	57	59	61	62	64	65	65	


A es el suelo

AF: longitud entre el suelo y el punto F (medio mulso)



Medias **Compresión normal**

Viadol® Media larga con blonda

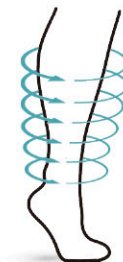

C.N.	C.I.	Ref.	EAN	Descripción
● 308270.9	734662	20014082	 8 470003 082709	VIADOL MEDIA LARGA CON BLONDA (A-F) BEIGE TALLA PEQUEÑA II S
● 310946.8	734663	20014083	 8 470003 109468	VIADOL MEDIA LARGA CON BLONDA (A-F) BEIGE TALLA MEDIANA III M
● 311266.6	734664	20014084	 8 470003 112666	VIADOL MEDIA LARGA CON BLONDA (A-F) BEIGE TALLA GRANDE IV L
● 316034.6	734665	20014085	 8 470003 160346	VIADOL MEDIA LARGA CON BLONDA (A-F) BEIGE TALLA XGRANDE V XL
● 257037.5	734666	20014086	 8 470002 570375	VIADOL MEDIA LARGA CON BLONDA (A-F) BEIGE TALLA REINA VI
● 316570.9	734657	20014062	 8 470003 165709	VIADOL MEDIA LARGA CON BLONDA (A-F) NEGRA TALLA PEQUEÑA II S
● 316588.4	734658	20014063	 8 470003 165884	VIADOL MEDIA LARGA CON BLONDA (A-F) NEGRA TALLA MEDIANA III M
● 317073.4	734659	20014064	 8 470003 170734	VIADOL MEDIA LARGA CON BLONDA (A-F) NEGRA TALLA GRANDE IV L
● 317081.9	734660	20014065	 8 470003 170819	VIADOL MEDIA LARGA CON BLONDA (A-F) NEGRA TALLA XGRANDE V XL
● 257038.2	734661	20014066	 8 470002 570382	VIADOL MEDIA LARGA CON BLONDA (A-F) NEGRA TALLA REINA VI

Indicaciones:

- Sensación de pesadez o cansancio en las piernas y molestias intensas
- Varicosis acusadas con tendencia al edema
- Tumefacciones post-traumáticas
- Tras curación de úlceras varicosas leves
- Después de tromboflebitis superficiales
- Después del tratamiento esclerosante y quirúrgico de varices
- Varicosis incipientes del embarazo



nueva línea
de medias
de compresión
decreciente

Viadol®


Tallas Pequeña Mediana Grande XGrande Reina

		II S	III M	IV L	V XL	VI						
	Anchura en cm.	b	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		b1	25,5	26,5	27,5	29	30	31,5	32,5	34	36	38
		c	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42	44	46
		d	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	43	45
		f	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53	57	59
		Longitud en cm.	A-B	11	11	12	12	12	13	13	13	11
A-B1	19		19	20	20	21	21	21	21	19	19	
A-C	26		26	27	27	27	28	28	28	26	26	
A-D	38		38	39	39	40	40	41	41	38	38	
A-F	57		57	59	61	62	64	65	65	57	57	

A es el suelo
AF: longitud entre el suelo y el punto F (medio mulso)



Medias **Compresión normal**

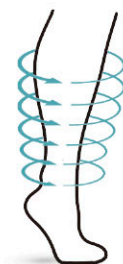

Viadol® Media larga



C.N.	C.I.	Ref.	EAN	Descripción
● 209478.9	734444	10013482	 8 470002 094789	VIADOL MEDIA CORTA (A-D) BEIGE TALLA PEQUEÑA II S
● 209486.4	734445	10013483	 8 470002 094864	VIADOL MEDIA CORTA (A-D) BEIGE TALLA MEDIANA III M
● 209494.9	734446	10013484	 8 470002 094949	VIADOL MEDIA CORTA (A-D) BEIGE TALLA GRANDE IV L
● 209502.1	734447	10013485	 8 470002 095021	VIADOL MEDIA CORTA (A-D) BEIGE TALLA XGRANDE V XL
● 157560.9	734440	10013462	 8 470001 575609	VIADOL MEDIA CORTA (A-D) NEGRA TALLA PEQUEÑA II S
● 157578.4	734441	10013463	 8 470001 575784	VIADOL MEDIA CORTA (A-D) NEGRA TALLA MEDIANA III M
● 157586.9	734442	10013464	 8 470001 575869	VIADOL MEDIA CORTA (A-D) NEGRA TALLA GRANDE IV L
● 157594.4	734443	10013465	 8 470001 575944	VIADOL MEDIA CORTA (A-D) NEGRA TALLA XGRANDE V XL

Indicaciones:


- Sensación de pesadez o cansancio en las piernas y molestias intensas
- Varicosis acusadas con tendencia al edema
- Tumefacciones post-traumáticas
- Tras curación de úlceras varicosas leves
- Después de tromboflebitis superficiales
- Después del tratamiento esclerosante y quirúrgico de varices
- Varicosis incipientes del embarazo



nueva línea
de medias
de compresión
decreciente

Viadol®

Tallas Pequeña Mediana Grande XGrande

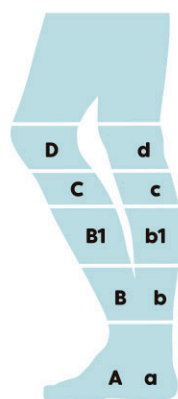


Anchura en cm.		IIS		III M		IV L		V XL	
		b	20	21	22	23	24	25	26
b1	25,5	26,5	27,5	29	30	31,5	32,5	34	34
c	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42	42
d	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40	40
Longitud en cm.	A-B	11	11	12	12	12	12	13	13
	A-B1	19	19	20	20	21	21	21	21
	A-C	26	26	27	27	27	28	28	28
	A-D	38	38	39	39	40	40	41	41

A es el suelo

AD: Longitud entre el suelo y el punto D (Rodilla)



Medias **Compresión normal**

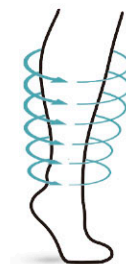

Viadol® **Media larga caballero**



C.N.	C.I.	Ref.	EAN	Descripción
------	------	------	-----	-------------

● 158009.2	734462	10015262	 8 470001 580092	VIADOL MEDIA LARGA CABALLERO (A-F) NEGRO TALLA PEQUEÑA II S
● 158010.8	734463	10015263	 8 470001 580108	VIADOL MEDIA LARGA CABALLERO (A-F) NEGRO TALLA MEDIANA III M
● 158011.5	734464	10015264	 8 470001 580115	VIADOL MEDIA LARGA CABALLERO (A-F) NEGRO TALLA GRANDE IV L
● 158012.2	734465	10015265	 8 470001 580122	VIADOL MEDIA LARGA CABALLERO (A-F) NEGRO TALLA XGRANDE V XL

Viadol® **Calcetín caballero**



C.N.	C.I.	Ref.	EAN	Descripción
------	------	------	-----	-------------

● 329680.9	734667	20020152	 8 470003 296809	VIADOL CALCETIN CRO (A-D) NEGRO TALLA PEQUEÑA II S (37-39)
● 329672.4	734668	20020153	 8 470003 296724	VIADOL CALCETIN CRO (A-D) NEGRO TALLA MEDIANA III M (39-41)
● 329664.9	734669	20020154	 8 470003 296649	VIADOL CALCETIN CRO (A-D) NEGRO TALLA GRANDE IV L (41-43)
● 207038.7	826647	20020155	 8 434048 370917	VIADOL CALCETIN CRO (A-D) NEGRO TALLA XGRANDE V XL (43-45)


Indicaciones:

- Sensación de pesadez o cansancio en las piernas y molestias intensas
- Varicosis acusadas con tendencia al edema
- Tumefacciones post-traumáticas
- Tras curación de úlceras varicosas leves
- Después de tromboflebitis superficiales
- Después del tratamiento esclerosante y quirúrgico de varices
- Varicosis incipientes del embarazo



nueva línea
de medias
de compresión
decreciente


Viadol®

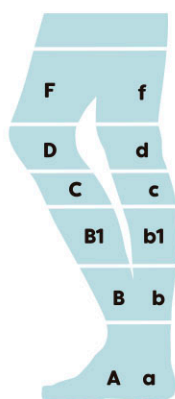

Tallas	Pequeña	Mediana	Grande	XGrande	
	IIS	III M	IV L	V XL	
Anchura en cm.	b	22	24	26	28
	b1	27,5	30	32,5	35
	c	34,5	37,5	40,5	43,5
	d	32,5	35,5	38,5	41,5
	f	45,5	48,5	51,5	54,5
Longitud en cm.	A-B	12	12	13	13
	A-B₁	20	21	21	21
	A-C	27	27	28	28
	A-D	39	40	41	42
	A-F	59	62	65	66



A es el suelo
AF: Longitud entre el suelo y el punto F (medio muslo)

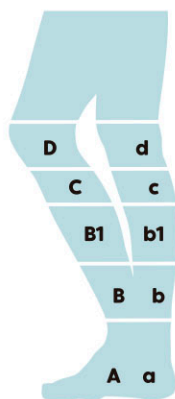


Tallas	Pequeña	Mediana	Grande	XGrande	
	IIS	III M	IV L	V XL	
Anchura en cm.	b	20	22	24	25
	b1	25,5	26,5	27,5	30
	c	31,5	33	34,5	37,5
	d	29,5	31	32,5	34
Longitud en cm.	A-B	11	12	12	12
	A-B₁	19	20	21	21
	A-C	26	27	27	28
	A-D	38	39	40	40
Calzado	37	39	41	43	



A es el suelo // AD: Longitud entre el suelo y el punto D (Rodilla)

Medias **Compresión ligera**

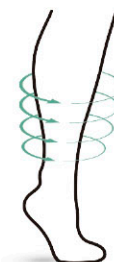

Viadol® Media entera



C.N.	C.I.	Ref.	EAN	Descripción
● 208678.4	734709	86010102	 8 470002 086784	VIADOL MEDIA ENTERA (E-T) BEIGE TALLA PEQUEÑA II S
● 208686.9	734710	86010103	 8 470002 086869	VIADOL MEDIA ENTERA (E-T) BEIGE TALLA MEDIANA III M
● 208694.4	734711	86010104	 8 470002 086944	VIADOL MEDIA ENTERA (E-T) BEIGE TALLA GRANDE IV L
● 208702.6	734712	86010105	 8 470002 087026	VIADOL MEDIA ENTERA (E-T) BEIGE TALLA XGRANDE V XL
● 208637.1	734713	86010152	 8 470002 086371	VIADOL MEDIA ENTERA (E-T) NEGRA TALLA PEQUEÑA II S
● 208645.6	734714	86010153	 8 470002 086456	VIADOL MEDIA ENTERA (E-T) NEGRA TALLA MEDIANA III M
● 208652.4	734715	86010154	 8 470002 086524	VIADOL MEDIA ENTERA (E-T) NEGRA TALLA GRANDE IV L
● 208660.9	734716	86010155	 8 470002 086609	VIADOL MEDIA ENTERA (E-T) NEGRA TALLA XGRANDE V XL

Indicaciones:


- Sensación de pesadez o cansancio en las piernas
- Varicosis ligeras sin tendencia al edema
- Varicosis incipientes del embarazo



nueva línea
de medias
de compresión
decreciente

Viadol®

Tallas Pequeña Mediana Grande XGrande

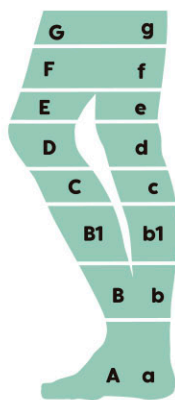


		II S		III M		IV L		V XL	
Anchura en cm.	b	20	21	22	23	24	25	26	27
	b1	25,5	26,5	27,5	29	30	31,5	32,5	34
	c	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42
	d	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40
	f	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53
	g	46	48	50	52	54	56	58	60
	Longitud en cm.	A-B	11	11	12	12	12	12	13
A-B₁		19	19	20	20	21	21	21	21
A-C		26	26	27	27	27	28	28	28
A-D		38	38	39	39	40	40	41	41
A-F		57	57	59	61	62	64	65	65
A-G		68	68	71	73	75	76	78	78

A es el suelo
AG: Longitud entre el suelo y el punto G
(la parte superior del muslo, justo debajo de la entrepierna)



Medias **Compresión ligera**

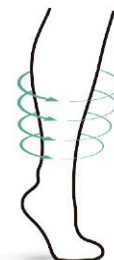

Viadol® Media Larga con blonda

C.N.	C.I.	Ref.	EAN	Descripción
● 384925.8	734649	20011002	 8 470003 849258	VIADOL MEDIA LARGA CON BLONDA (A-F) BEIGE TALLA PEQUEÑA II S
● 338525.1	734650	20011003	 8 470003 385251	VIADOL MEDIA LARGA CON BLONDA (A-F) BEIGE TALLA MEDIANA III M
● 338517.6	734651	20011004	 8 470003 385176	VIADOL MEDIA LARGA CON BLONDA (A-F) BEIGE TALLA GRANDE IV L
● 384792.6	734652	20011005	 8 470003 847926	VIADOL MEDIA LARGA CON BLONDA (A-F) BEIGE TALLA XGRANDE V XL

Indicaciones:

- Sensación de pesadez o cansancio en las piernas
- Varicosis ligeras sin tendencia al edema
- Varicosis incipientes del embarazo



nueva línea
de medias
de compresión
decreciente

Viadol®

Tallas Pequeña Mediana Grande XGrande


		II S		III M		IV L		V XL	
	b	20	21	22	23	24	25	26	27
	b1	25,5	26,5	27,5	29	30	31,5	32,5	34
	c	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42
	d	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40
	f	42,5	44	45,5	47	48,5	50	51,5	53
	A-B	11	11	12	12	12	12	13	13
	A-B₁	19	19	20	20	21	21	21	21
	A-C	26	26	27	27	27	28	28	28
	A-D	38	38	39	39	40	40	41	41
	A-F	57	57	59	61	62	64	65	65

A es el suelo

AF: Longitud entre el suelo y el punto F (medio muslo)



Medias **Compresión ligera**

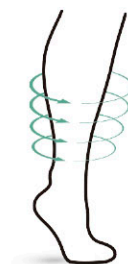

Viadol® Media corta



C.N.	C.I.	Ref.	EAN	Descripción
● 207039.4	827143	86013482	 8 434048 375943	VIADOL MEDIA CORTA (A-D) BEIGE TALLA PEQUEÑA II S
● 311779.1	734719	86013483	 8 470003 117791	VIADOL MEDIA CORTA (A-D) BEIGE TALLA MEDIANA III M
● 311787.6	734720	86013484	 8 470003 117876	VIADOL MEDIA CORTA (A-D) BEIGE TALLA GRANDE IV L
● 207040.0	827144	86013485	 8 434048 375950	VIADOL MEDIA CORTA (A-D) BEIGE TALLA XGRANDE V XL
● 207041.7	827145	86013452	 8 434048 375967	VIADOL MEDIA CORTA (A-D) NEGRA TALLA PEQUEÑA II S
● 313700.3	734717	86013453	 8 470003 137003	VIADOL MEDIA CORTA (A-D) NEGRA TALLA MEDIANA III M
● 313718.8	734718	86013454	 8 470003 137188	VIADOL MEDIA CORTA (A-D) NEGRA TALLA GRANDE IV L
● 207042.4	827146	86013455	 8 434048 375974	VIADOL MEDIA CORTA (A-D) NEGRA TALLA XGRANDE V XL

Indicaciones:


- Sensación de pesadez o cansancio en las piernas
- Varicosis ligeras sin tendencia al edema
- Varicosis incipientes del embarazo



nueva línea
de medias
de compresión
decreciente

Viadol®

Tallas Pequeña Mediana Grande XGrande

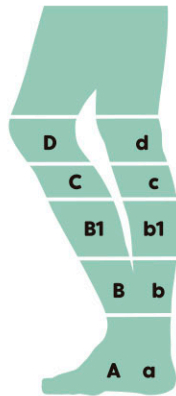

Anchura en cm.	IIS		III M		IV L		V XL	
	b	b1	c	d	b	b1	c	d
b	20	21	22	23	24	25	26	27
b1	25,5	26,5	27,5	29	30	31,5	32,5	34
c	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40,5	42
d	29,5	31	32,5	34	35,5	37	38,5	40
Longitud en cm.	A-B	11	11	12	12	12	13	13
	A-B1	19	19	20	20	21	21	21
	A-C	26	26	27	27	27	28	28
	A-D	38	38	39	39	40	40	41

A es el suelo

AD: Longitud entre el suelo y el punto D (Rodilla)



Para el alivio de las piernas cansadas

Fisioprim piernas cansadas es un gel no graso, especialmente formulado con extractos vegetales que proporciona una sensación de bienestar y alivio de piernas cansadas.



fisioprim
piernas cansadas

Acción venotónica que facilita la contracción de los vasos, las venas y capilares favoreciendo el flujo de la sangre.

Acción vitamínica P que se traduce en un aumento de la resistencia de las pequeñas venas y capilares y en una disminución de la permeabilidad capilar.

C.N.

C.I.

Ref.

EAN

Descripción

194188.6

738282

FP PIERNA 01



FISIOPRIM GEL PIERNAS CANSADAS 250 ML

PRODUCTOS
PREVENTIVOS
Y TERAPÉUTICOS

**Medias
de compresión
decreciente**

nueva línea
de medias
de compresión
decreciente


Viadol®



Recomendaciones para evitar y/o mejorar las varices

1. No permanecer de pie o sentado durante períodos de tiempo prolongados.
2. Es recomendable la práctica de un deporte adecuado.
3. Evitar el estreñimiento y el sobrepeso.
4. Evitar el exceso de calor.
5. Duchas de agua fría.
6. Utilizar ropa cómoda.
7. Utilizar calzado amplio y confortable.
8. Masajes en las piernas.
9. Elevar las piernas tantas veces al día como sea posible.
10. Elevación de los pies durante el descanso en la cama.
11. Evitar cargas pesadas.

Viadol®

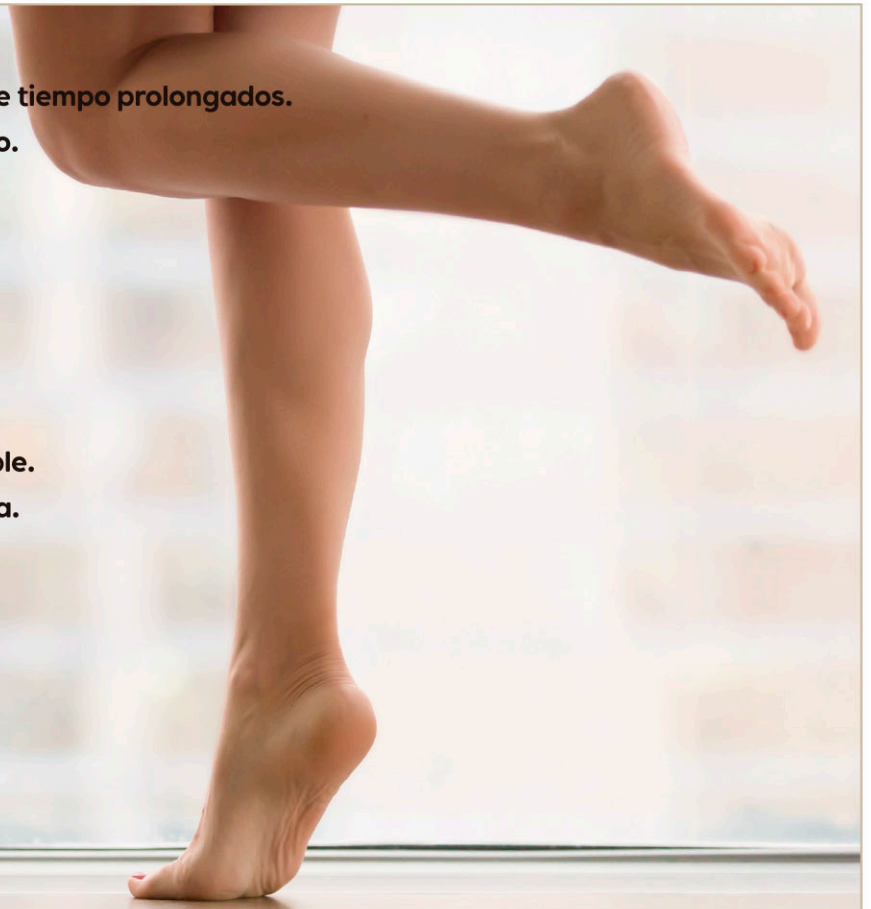



PRIM

PRIM S.A.

Avda. del Llano Castellano, 43. Planta 3
28034 Madrid
ESPAÑA



Viadol®

nueva línea de medias de compresión decreciente

CI 826503



www.prim.es