



**Movemos
la vida.**
Somos
especialistas



Podología

Guía de Prevención y Tratamiento
podológico personalizado



Todos los pies son diferentes.
Sus patologías y su tratamiento también lo son

Podología

Identifique y localice las principales patologías de los pies de sus pacientes y recomiende los productos más adecuados a través de un sencillo proceso:

1


Identifique la **parte del pie afectada** y la **horma** del calzado utilizado habitualmente por el usuario.

2

Seleccione la **gama de productos más adecuada** en base a las respuestas del usuario a las preguntas clave.

Guía de Prevención y Tratamiento podológico personalizado

Esta nueva **Guía de Podología**, le ayudará de manera ágil y sencilla a recomendar el producto más adecuado en la **selección entre silicona o gel y sus aplicaciones**, respondiendo a las preguntas más comunes de sus pacientes y ofreciendo la solución ideal para el tratamiento o atenuación de las patologías más frecuentes de los pies.

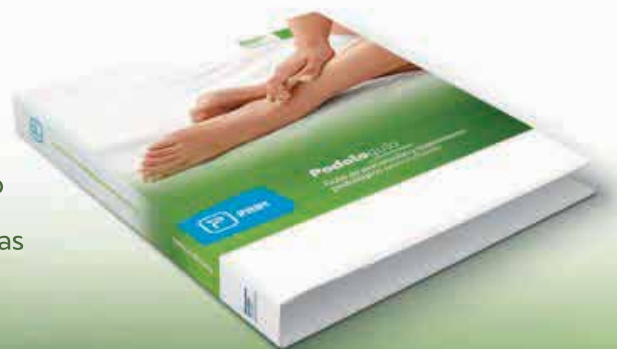



Las partes del pie

Talón

Espolón calcáneo
Tendinitis
Ampollas

Antepié

Metatarsalgia
Durezas
Pie abierto

Dedos

Hallux Valgus
(juanetes)
Ojos de gallo
Callos
Uña Incarnata
Fractura
Dedos en garra
Roces

Identifique
y localice las
principales
patologías
de los pies



Planta

Fascitis plantar
Hiprehidrosis
Dismetría

Tipo de calzado

El tipo de horma de calzado utilizará condicionaré el tratamiento más adecuado.

De esta forma una misma patología podrá ser tratada con distintos productos en función del calzado y su tipo de horma (ancha, estrecha o en punta), y conseguir así, un **tratamiento combinado más eficaz**.

Zapato ancho

Zapato estrecho

Zapato punta





Guía de Prevención
y Tratamiento
podológico
personalizado

Podología

La gama de productos

La elección del producto a recomendar depende de la respuesta del usuario a 3 preguntas clave:

1

¿Tiene Ud. dolor que en ocasiones puede llegar a resultarle invalidante al caminar?

Productos de silicona ComforSil

Por sus características mecánicas de resistencia, **se utiliza en patologías que requieren TRATAMIENTO**

2

¿Siente Ud. molestias que le dificultan caminar o usar algún tipo de calzado?

Productos de gel ComforGel

Por sus características de flexibilidad y adaptación, **el gel se usa como PREVENCIÓN al aparecer las primeras molestias en los pies.**

3

¿Pasa mucho tiempo de pie y necesita que su calzado sea más cómodo?

Productos confort ComforGel

Por las características de adaptabilidad del material, **se utilizan para conferir mayor comodidad en el uso de todo tipo de calzado.**

ComforGel Lady



PRIM

Patologías dedos

Hallux Valgus (juanetes)

Ojos de gallo

Callos

Uña Incarnata

Fracturas

Dedos en garra

Roces

Podología

Guía de Prevención
y Tratamiento
podológico
personalizado



Hallux valgus (juanetes)

Descripción patología: Abultamiento pronunciado con o sin inflamación alrededor del dedo gordo o 1er dedo principalmente, ocasionando a la persona que lo padece problemas al caminar y dolor por el roce del calzado.

Síntomas: Deformidad ósea con desviación axial de la primera articulación. Dolor debido a la presión y/o fricción con el calzado. Inflamación de las partes blandas, debido a la deformidad ósea.

ComforSil

¿Tiene dolor que en ocasiones puede llegar a resultarle invalidante al caminar?

Productos de silicona

Tratamiento

HORMA			
Punta/Tacón	Dolor por roce del zapato en la zona lateral del dedo. Necesidad de protección.	CC264 Protector de Juanetes Sin costuras	PAG. 10
Estrecha/Tacón	Dolor en el lateral del juanete. Necesidad de amortiguación en la pisada al caminar por dolor en la zona metatarsal y protección de juanete.	CC320 Protector elástico "Triple acción" Sin costuras	PAG. 10
Ancha/Estrecha	Dolor en el lateral del juanete observándose rigidez en el 1er y 2º dedo observándose flexibilidad del 1er dedo para poder caminar y calzarse adecuadamente.	CC450 Corrector diurno de juanetes Sin costuras	PAG. 11
Ancha	Juanete pronunciado con superposición entre el 1er y 2º dedo observándose flexibilidad del 1er dedo. Necesidad de separación entre los dedos.	CC218 Separador (carrete)	PAG. 11
Estrecha	Juanete menos pronunciado. Necesidad de separar y alinear el 1er y 2º dedo y proporcionar comodidad.	CC206 Separador (medialuna)	PAG. 12
	Dolor intenso por la noche y rigidez del 1er dedo. Necesidad de corrección postural y alivio del dolor. Uso mínimo 2-3 veces por semana.	CC250/1/2 Corrector Nocturno de juanetes	PAG. 12
Ancha	Faja de sujeción tras operación de juanete	CC322 Faja metatarsal post-operatoria	PAG. 13



Hallux valgus (juanetes)

ComforGel

¿Siente molestias que le dificultan caminar o usar algún tipo de calzado?

HORMA

Productos de gel

Prevención

Ancha/Estrecha	Molestias del calzado en la zona del lateral del juanete en su fase incipiente.	CG1801 Protector de juanete con anillo adaptable	PAG. 20
Ancha	Primeros síntomas de juanete para separar y proteger de los roces del calzado sobre el mismo.	CG2301 Juanetero con separador de carrete	PAG. 20
Ancha	Molestias con primeros síntomas de desviación del 1er dedo. Necesidad de separación con textura blanda para mejorar el confort.	CG2101 Separador de dedos con anillo	PAG. 21
Estrecha/Tacón	Molestias leves en la zona del juanete para proporcionar alivio de la presión del calzado.	CG1601 Protector en tejido elástico	PAG. 21
Ancha	Ligera separación del 1er y 2º dedo. Se utiliza al observar los primeros síntomas de desviación.	CG1101 Separador (carrete)	PAG. 22
Ancha/Estrecha	Molestias en el 5º dedo por roce con el calzado. Protector en 5º dedo y lateral.	CG1901 Protector juanetes en el 5º dedo	PAG. 22
Punta/Tacón	Protección de durezas y presión en el 5º dedo al observar ligera desviación del mismo.	CG1701 Anillo protector para el 5º dedo	PAG. 23



Ojos de gallo

Descripción patológica: Callo que se forma entre los dedos de los pies. Es muy doloroso debido a que se produce de dentro hacia afuera, es decir, se origina por la fricción entre los huesos de ambos dedos, esto produce un dolor muy agudo y limitante.

Síntomas: Tiende a surgir como una parte de la piel erosionada e inflamada, muy húmeda, la cual suele infectarse por hongos o por bacterias dependiendo de su gravedad.

ComforSil

¿Tiene dolor que en ocasiones puede llegar a resultarle invalidante al caminar?

Productos de silicona

HORMA

Tratamiento

Estrecha

Molestias por **dolor interdigital** ocasionadas por **presión entre los dedos**.

CC206
Separador extrafino
(medialuna)

PAG.
12

ComforGel

¿Siente molestias que le dificultan caminar o usar algún tipo de calzado?

Productos de gel

HORMA

Prevención

Estrecha

Molestias **interdigitales** que requieren un separador para **evitar la fricción** entre los dedos.

CG2102
Separador extrafino
(medialuna)

PAG.
23

Ancha/Estrecha

Molestias **interdigitales** que requieren protección para **evitar la presión del calzado** sobre los dedos. **Pieza cortada** a tamaño pequeño.

CG1201 **Anillos digitales recubiertos con tejido elástico**

PAG.
24

Ancha/Estrecha

Molestias **interdigitales** que requieren protección con gel recubierto de textil elástico Mesh para **perfecta adaptación al dedo y recortables** al tamaño deseado.

CC245 **Tubos protectores con recubrimiento tejido Mesh para cortar**

PAG.
24

Ancha/Estrecha

Molestias **interdigitales** que requieren protección con gel recubierto de textil Canale de **diferente diametro para cada tipo de dedo**. **Recortables** al tamaño deseado.

CC325/CC253 **Tubos protectores con recubrimiento tejido Canale para cortar**

PAG.
25

Ancha/Estrecha

Molestias **interdigitales** que requieren protección con gel recubierto de textil. **Envase de 12 unidades** para una utilización de **forma frecuente**.

PRO5016/PRO5018/
PRO5017 **Tubos protectores con recubrimiento para cortar (distintos tamaños y tejidos Mesh y Canale)**

PAG.
25



Callos

Descripción patología: Dolor al caminar, al calzarse. Aparición de piel endurecida brillante amarillenta en cualquier parte del pie. Generalmente causados por presión o fricción en la piel.

Síntomas: Dolor agudo en la zona donde se forma el callo. Piel endurecida y gruesa.

ComforSil

¿Tiene dolor que en ocasiones puede llegar a resultarle invalidante al caminar?

Productos de silicona

HORMA

Estrecha/Punta

Necesidad de protección suave por fricción o roce del calzado sobre el callo produciendo dolor.

Punta/Tacón

Necesidad de protección almohadillada por presión del calzado sobre el callo produciendo dolor.

Callo localizado. Tratamiento para la eliminación del callo.

Tratamiento

PRO0108
Vendaje tubular (textil)

PAG.
13

CC327
Parches adhesivos callos

PAG.
14

CAR539
Apósitos para callos

PAG.
14

ComforGel

¿Siente molestias que le dificultan caminar o usar algún tipo de calzado?

Productos de gel

HORMA

Ancha/Estrecha

Molestias por fricción del calzado sobre callos y callosidades. Anillo de colocación sobre el callo para evitar la presión sobre el mismo.

Punta/Tacón

Protectores recubiertos elásticos recortables al tamaño necesario para aliviar la presión del calzado sobre callos.

Punta/Tacón

Molestias por callosidades interdigitales que requieren protección con gel recubierto de textil Canale de diferente diámetro para cada tipo de dedo. Recortables al tamaño deseado.

Prevención

CG1201 Anillos digitales recubiertos con tejido elástico

PAG.
24

CC245 Tubos protectores con recubrimiento tejido Mesh para cortar

PAG.
24

CC325/CC253 Tubos protectores con recubrimiento tejido Canale para cortar

PAG.
25



Uña Incarnata

Descripción patología: Uña que se introduce en los tejidos blandos provocando su inflamación. Afección muy dolorosa, presentándose casi exclusivamente en el 1er dedo.

Síntomas: Dolor de gran intensidad. Incapacidad para caminar y poderse calzar.

ComforSil

¿Tiene dolor que en ocasiones puede llegar a resultarle invalidante al caminar?

HORMA

Productos de silicona

Ancha

Dolor incapacitador en el primer dedo/uña por lesiones o traumatismo que requieren **evitar el roce o presión sobre la zona.**

Cuidado de uñas

Tratamiento

CC227
Dedil protector

PAG.
15

CC284
Set manicura

PAG.
15

ComforGel

¿Siente molestias que le dificultan caminar o usar algún tipo de calzado?

HORMA

Productos de gel

Ancha

Molestias en el **1er dedo** por roces o pequeñas heridas que precisan **protección leve y muy adaptable.**

Ancha

Molestias en el **1er dedo.** Necesidad de proteger o cubrir el dedo para evitar el roce con el zapato.

Prevención

CG0901
Dedil protector

PAG.
26

CC267
Dedil tejido elástico con recubrimiento interior de gel

PAG.
26



Dedos en garra



Descripción patológica: Dedos encogidos, ocasionando una elevación debido a una atrofia que se produce en los ligamentos y tendones. Puede afectar a todos los dedos del pie.

Síntomas: Va desde el aspecto físico y puramente estético hasta situaciones que pueden limitar la correcta deambulaci3n.

ComforSil

HORMA

¿Tiene dolor que en ocasiones puede llegar a resultarle invalidante al caminar?

Productos de silicona

Tratamiento

Ancha/Estrecha

Agarrotamiento con dolor de dedos entre sí con molestias al caminar y/o al calzarse.

CC226
Ratoncitos con anillo

PAG.
16

ComforGel

HORMA

¿Siente molestias que le dificultan caminar o usar algun tipo de calzado?

Productos de gel

Prevenci3n

Ancha/Estrecha

Flexi3n de los dedos provocado por el hundimiento de la cabeza de los metatarsos. Necesidad de descanso en metatarsos para que los dedos se estiren.

CCF323 Plantillas
extrafinas forradas
(apoyo metatarsal y calc3neo)

PAG.
27

Punta/Tac3n

Molestias por presi3n del calzado en las callosidades superiores de los dedos flexionados al estar en garra.

CC245 Tubos protectores
con recubrimiento tejido
Mesh para cortar

PAG.
24

Punta/Tac3n

Molestias por presi3n del calzado en las callosidades superiores de los dedos flexionados al estar en garra.

CC325/CC253
Tubos protectores con
recubrimiento tejido
Canale para cortar

PAG.
25



Roces



Descripción patología: Irritación causada por la fricción repetida en una zona específica de la piel.

Síntomas: Aparecen por el uso inadecuado de calzado o por ciertas alteraciones del pie. Son causa de dolor y en ocasiones pueden llegar a ser incapacitantes.

ComforSil

¿Tiene dolor que en ocasiones puede llegar a resultarle invalidante al caminar?

HORMA

Productos de silicona

Tratamiento

Estrecha / Punta

Pequeñas heridas por roces del calzado en cualquier zona del pie.

CC329 Lámina de silicona recortable adherente

PAG. 16

Estrecha / Punta

Pequeñas heridas por roces del calzado en cualquier zona del pie.

CC249 Lámina de fieltro recortable adherente

PAG. 17

Botas

Protección de **rozaduras** producidas por presión en **superficies grandes:** tibia (botas de esquí) o espalda (mochilas), etc

CC332 Protector tibial de silicona adherente

PAG. 17

Fracturas



Descripción patología: Ruptura de una o varias falanges de los dedos. Suelen producirse por traumatismo directo, por impacto de un elemento pesado sobre los dedos y en ocasiones con lesiones externas.

Síntomas: Dolor a la presión, impotencia funcional, hematoma e inflamación

ComforSil

¿Tiene dolor que en ocasiones puede llegar a resultarle invalidante al caminar?

HORMA

Productos de silicona

Tratamiento

Ancha

Traumatismos en dedos: Dolor e incapacidad para caminar. Necesidad de **inmovilización de los dedos lesionados.**

P5002 Toe Loops

PAG. 18

Productos de silicona



ComforSil®

Comforsil® Soft Solution, mejora el diseño anatómico de los productos, el confort en su uso y su apariencia.

Un paso adelante más de la marca referente de productos de silicona para el cuidado de los pies.

Eficacia, resistencia y comodidad en silicona



COMFORSIL *Textiles Sin Costuras*
Protector de juanetes
 CC264

MATERIAL: Poliamida / elastan / Silicona

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
S	800316	251978.7	x1
L	800315	251977.0	x1

CARACTERÍSTICAS

- Protector elástico con almohadilla interna de silicona.
- Confeccionado en suave material elástico con diferentes zonas de compresión y sin costuras



COMFORSIL *Textiles Sin Costuras*
Protector elástico “Triple acción”
 CC320

MATERIAL: Poliamida / elastan / Silicona

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
SP	800330	155472.7	x2
LP	800329	155474.1	x2

CARACTERÍSTICAS

- Protector elástico de triple acción con almohadilla interna de silicona 100%.
- Confeccionado en tejido elástico con diferentes zonas de compresión y sin costuras.
- Alivia la presión del calzado en: juanete, metatarsos y callosidades.



COMFORSIL *Textiles Sin Costuras*
Corector diurno de juanetes
CC450

MATERIAL: Poliamida / elastan / Silicona

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
R	739278		x1
L	739229		x1

CARACTERÍSTICAS

- Corector diurno de Hallux Valgus con almohadilla protectora de silicona en la zona del juanete.
- Confeccionado en suave material elástico con distintas zonas de compresión y sin costuras.



COMFORSIL
Separador (carrete)
CC218

MATERIAL: Silicona

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
S	800398	156332.3	x2
M	800397	156333.0	x2
L	800396	156334.7	x2

CARACTERÍSTICAS

- Separador grueso en forma de carrete fabricado en silicona 100% para colocar entre el 1er y 2º dedo.



COMFORSIL
Separador (medialuna)
CC206

MATERIAL: Silicona

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
S	800395	155815.2	x3
M	800394	155816.9	x3
L	800393	155817.6	x3

CARACTERÍSTICAS

- Separadores finos en forma de medialuna fabricados en silicona 100% con forma anatómica para proporcionar una mejor adaptación entre los dedos 2º a 4º.



COMFORSIL
Corrector nocturno de juanetes
CC250/51/52

MATERIAL: Plástico / Polietileno / Poliamida

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
Única	800423	163001.8	x2
Dcho.	800424	163002.5	x1
Izqdo.	800426	163003.2	x1

CARACTERÍSTICAS

- Ortesis de pie fabricada en plástico inyectado y forrada con espuma de polietileno.
- Incorpora elementos textiles en color gris 100% poliamida.
- Uso exclusivamente nocturno
- No caminar con la ortesis colocada



COMFORSIL
Faja metatarsal post-operatoria
CC322

MATERIAL: Textil/ Clip

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
S	800433	155706.3	x1
M	800432	155707.0	x1
L	800431	155708.7	x1

CARACTERÍSTICAS

- Faja de textil elástico con clip de sujeción para su perfecta adaptación.



COMFORSIL
Vendaje tubular textil
PRO0108

MATERIAL: Foam /Algodón

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
S	800460	177225.1	x12
M	800457	177226.8	x12
L	800458	177227.5	x12

CARACTERÍSTICAS

- Protector tubular de dedos con interior forrado de algodón.
- Recortable, lavable y reutilizable.



COMFORSIL
Parches adherentes para callos
CC327

MATERIAL: Poliamida y elastan / Lycra/ Gel de silicona

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
Única	800613	161334.9	x4

CARACTERÍSTICAS

- Parches lavables y reutilizables (hasta 25 lavados) sin pegamento, con agujero en el centro para liberar la presión sobre el callo.
- Grosor aproximado: 1,5mm.



COMFORSIL
Apósitos para callos
CAR539

MATERIAL: Apósito autoadherente con anillo de fieltro 40% ácido salicílico

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
Única	804071	159588.1	x10

CARACTERÍSTICAS

- Apósito que contiene un compuesto único de ácido salicílico que penetra en el callo y ayuda a su eliminación, mientras que el anillo de fieltro disminuye la presión del calzado sobre el mismo.
- Contiene aceite de cacahuete. No usar si se es diabético.



COMFORSIL
Dedil protector
CC227

MATERIAL: Silicona

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
S	800277	156345.3	x2
L	800276	156346.0	x2

CARACTERÍSTICAS

- Dediles de silicona para cubrir el 1er dedo.
- Reforzados en la punta para mayor protección.



COMFORSIL
Set de manicura portátil
CC284

MATERIAL:

C.Interno	C.Nacional	Contenido
800536	333624.6	x1

CARACTERÍSTICAS

- Set con bolsa de conservación.
- Incluye un juego de 5 fresas para pulir, limar y dar brillo a las uñas.
- Funciona con 2 pilas (no incluidas).



COMFORSIL Ratoncitos con anillo CC226

MATERIAL: Silicona

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
S	809664	177222.0	x2
M	809663	177223.7	x2
L	809662	177224.4	x2

CARACTERÍSTICAS

- Ratoncitos de silicona con anillo. Se coloca bajo los dedos del pie adaptándose anatómicamente.
- Cuenta con un anillo textil de refuerzo que hace que sea más resistente en esta parte para evitar su desplazamiento.



COMFORSIL Lámina de silicona recortable adherente CC329

MATERIAL: Poliamida y elastan / Lycra/ Gel de silicona

Medidas	C.Interno	C.Nacional	Contenido
9,5x9,5 cm	800608	161336.3	x1

CARACTERÍSTICAS

- Lámina recortable, lavable y reutilizable (hasta 25 lavados) sin pegamento.
- Grosor aproximado: 1,5mm.



COMFORSIL
Lámina de fieltro
recortable adherente
CC249

MATERIAL: Fieltro / adhesivo

Medidas	C.Interno	C.Nacional	Contenido
22x7 cm.	800357	1579379	x1

CARACTERÍSTICAS

- Lámina recortable con adhesivo hipoalergénico.



COMFORSIL
Protector tibial adherente
CC332

MATERIAL: Poliamida y elastan / Lycra/ Gel de silicona

Medidas	C.Interno	C.Nacional	Contenido
9,5x9,5 cm	800603	161332.5	x1

CARACTERÍSTICAS

- Lámina fina de silicona, lavable y reutilizable (hasta 25 lavados) sin pegamento.



COMFORSIL
Toe loops
P5002

MATERIAL: Nylon / lycra / espuma

Medidas	C.Interno	C.Nacional	Contenido
2,5x7 cm.	723499		x5

CARACTERÍSTICAS

- Tiras inmovilizadoras para adaptar a los dedos, con lycra para sujeción.
- Lavables y reutilizables.



Productos de gel



ComforGel®

Productos de gel 100% puro, diseñados para proporcionar la máxima comodidad y flexibilidad protegiendo los pies allí donde se requiere un cuidado especial.

**100% confort.
Máxima flexibilidad y adaptabilidad**



COMFORGEL
Protector de juanete con
anillo adaptable
CG1801

MATERIAL: 100% Gel polímero

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
Única	736453	166449.5	x1

CARACTERÍSTICAS

- Protector de gel suave y flexible.
- Con anillo adaptable, aporta sujeción y comodidad.



COMFORGEL
Juanetero con separador
de carrete
CG2301

MATERIAL: 100% Gel polímero

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
Única	736447	170393.4	x1

CARACTERÍSTICAS

- Diseño que proporciona confort en el lateral del juanete por la fricción causada por el zapato.
- Se ajusta fácilmente en el dedo gordo del pie derecho o izquierdo.



COMFORGEL
Separador de dedos con anillo
CG2101

MATERIAL: 100% Gel polímero

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
M	736461	186708.7	x2
L	736460	186709.4	x2

CARACTERÍSTICAS

- Incorpora un anillo de sujeción que evita que el separador se desplace, a la vez que proporciona protección en el otro dedo.



COMFORGEL
Protector en tejido elástico
para juanetes
CG1601

MATERIAL: Poliamida / Elastane / 100% Gel polímero

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
S	736457	166450.1	x1
L	736456	166451.8	x1

CARACTERÍSTICAS

- Protector en tejido elástico para juanetes con almohadilla interna de gel.



COMFORGEL
Separador de dedos grueso
(Carrete)
CG1101

MATERIAL: 100% Gel polímero

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
S	736465	166453.2	x2
M	736464	166455.6	x2
L	736463	166456.3	x2

CARACTERÍSTICAS

- Separador de dedos grueso tipo carrete, extra blando y muy flexible.
- Utilización entre el 1er y 2º dedo.



COMFORGEL
Protector de juanetes
en el 5º dedo
CG1901

MATERIAL: 100% Gel polímero

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
Única	736452	166448.8	x1

CARACTERÍSTICAS

- Protector para juanete en el 5º dedo con anillo de sujeción.



COMFORGEL
Anillo protector para el 5º dedo
CG1701

MATERIAL: 100% Gel polímero

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
Única	736444	166460.0	x2

CARACTERÍSTICAS

- Anillo protector para el 5º dedo. Blando y adaptable



COMFORGEL
Separadores de dedos
extrafinos (media luna)
CG2102

MATERIAL: 100% Gel polímero

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
Mix S/M/L	736462	186710.0	x3

CARACTERÍSTICAS

- Separadores de dedos extrafinos de gel suave tipo medialuna.
- Surtido de 3 tamaños para colocar en los distintos dedos.



COMFORGEL
Anillos digitales recubiertos
de tejido elástico
CG1201

MATERIAL: 100% Gel polímero / Lycra / Poliamida

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
S/M	736443	166427.3	x2
L/XL	736442	166428.0	x2

CARACTERÍSTICAS

- Anillo digital de gel con recubrimiento textil.



COMFORGEL
Tubos protectores
CC245

MATERIAL: 100% Gel polímero / Lycra / Poliamida

Ø	C.Interno	C.Nacional	Contenido
1,5 cm	800342	157930.0	x2

CARACTERÍSTICAS

- Tubos digitales de gel con recubrimiento textil Mesh.
- Recortables



COMFORGEL
Tubos protectores
CC325/CC253

MATERIAL: 100% Gel polímero / Lycra / Poliamida

	Ø	C.Interno	C.Nacional	Contenido
CC325	1,5 cm.	800340	157251.6	x2
CC253	2,5 cm.	800295	163004.9	x2

CARACTERÍSTICAS

- Tubos digitales de gel con recubrimiento textil Canale.
- Recortables.



Canalé

Mesh

COMFORGEL
Separadores de dedos
extrafinos (media luna)

MATERIAL: 100% Gel polímero / Lycra / Poliamida

	Ø	C.Interno	C.Nacional	Contenido
PRO5016	1,5 cm.	800471	168818.7	x12
PRO5018	1,5 cm.	400469	177230.5	x12
PRO5017	2,5 cm.	800470	177229.9	x12

PRO5016/PRO5018/PRO5017

CARACTERÍSTICAS

- Tubos digitales de gel con recubrimiento textil Mesh (PRO5016) y Canale (PRO5018 / PRO5017).
- Recortables.



COMFORGEL
Dedil protector de Gel
CG0901

MATERIAL: 100% Gel polímero

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
S/M	736446	166430.3	x1
L/XL	736445	166431.0	x1

CARACTERÍSTICAS

- Dedil protector de gel.



COMFORGEL
Dedil protector recubierto
CC267

MATERIAL: 100% Gel polímero / Lycra / Poliamida

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
S	800444	266658.0	x1
L	800443	266657.3	x1

CARACTERÍSTICAS

- Dedil de gel recubierto de tejido elástico.



COMFORGEL
Plantillas extrafinas forradas
(apoyo metatarsal y calcáneo)
CCF323

MATERIAL: 100% Gel polímero

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
S (35 - 37)	800148	156290.6	x2
M (38 - 40)	800147	156291.3	x2
L (41 - 43)	800146	156292.0	x2
XL (44 - 46)	800149	156293.7	x2

CARACTERÍSTICAS

- Fabricadas en dos densidades, una de ellas especialmente blanda para la zona de descarga.



Patologías antepié

Metatarsalgia
Durezas
Pie abierto

Podología

Guía de Prevención
y Tratamiento
podológico
personalizado

Lesiones antepié



Metatarsalgia



Descripción patológica: Afección dolorosa del metatarso, expuesto a sobrecargas y altas exigencias mecánicas, especialmente en la práctica de deportes, exceso de peso o largas permanencias de pie.

Síntomas: Sensación de quemazón o de hormigueo en los dedos e incapacidad funcional.

ComforSil

¿Tiene dolor que en ocasiones puede llegar a resultarle invalidante al caminar?

HORMA

Productos de silicona

Tratamiento

Punta/Tacón	Dolor en zona metatarsal por sobrecarga sobre la misma. Necesidad de amortiguación al caminar para evitar el impacto sobre la zona.	CC256 Protector plantar con almohadilla Sin costuras	PAG. 06
Estrecha	Dolor en zona metatarsal con necesidad de amortiguación en casos de mayor presión por el estrechamiento del antepié con el uso de zapatos estrechos.	CC220 Almohadillas metatarsales con anillo de sujeción	PAG. 06
Punta/Tacón	Dolor en zona metatarsal y sensación de hormigueo en los dedos.	CC225 Protectores de antepié Sin costuras	PAG. 07
Ancha	Dolor en zona metatarsal y antepié .	CC229 Banda elástica con almohadilla	PAG. 07
Punta/Tacón	Necesidad de amortiguar la presión de sobrecarga en los metatarsos con el uso de zapatos que aumentan la presión sobre esta zona del pie.	CC257 Miniplantillas descanso extrafinas	PAG. 08
Punta/Tacón	Necesidad de amortiguar la presión de sobrecarga en los metatarsos con soporte de silicona, absorbe el sudor por su textura textil y evita el deslizamiento .	CCF401 Miniplantillas descanso extrafinas forradas	PAG. 08
Ancha	Dolor localizado en la planta del pie con necesidad de amortiguación al caminar para evitar el impacto sobre la zona metatarsal y talón .	CC209 Plantillas con descargas anti-impacto	PAG. 09



Metatarsalgia



ComforGel

¿Siente molestias que le dificultan caminar o usar algún tipo de calzado?

HORMA	Productos de gel	Prevención
Ancha/Estrecha	Molestias leves en la zona de los metatarsos. Necesidad de relajar la zona especialmente con zapatos cerrados.	CG1501 Protector plantar con almohadilla PAG. 10
Ancha	Molestias leves en la zona de los metatarsos. Necesidad de amortiguar el impacto en la zona.	CG0701 Almohadillas metatarsales con anillo de sujeción PAG. 10
Punta/Tacón	Molestias en la zona metarsal. Necesidad de leve amortiguación de la presión en la zona por sobrecarga al usar zapatos de tacón.	CG0401 Miniplantillas extrafinas antideslizantes PAG. 11
Estrecha	Fatiga ocasional con pesadez en pies y piernas.	CGF0370 Plantillas extrafinas forradas especial "all care" PAG. 11

ComforGel ComforGel Lady

¿Pasas mucho tiempo de pie y necesitas que tu calzado sea más cómodo?

HORMA	Productos de gel	Confort
Punta/Tacón	Necesidad de confort en zona de metatarsos	CG0366 Plantillas tacones muy altos PAG. 13
Estrecha	Necesidad de confort para pies cansados y delicados	CG0367 Plantillas tacones diarios PAG. 13
Punta/Tacón	Necesidad de confort en metatarsos y talón	CG0368 Pantillas zapatos abiertos PAG. 14
Ancha	Ayuda a mejorar la sensación de piernas cansadas y dolor de pies. Para uso diario	CGF0360/CGF0361 Plantillas diario (H+M) PAG. 14
Ancha	Uso específico en calzado de trabajo para proporcionar descanso extra al permanecer mucho tiempo de pie	CGF0364/CGF0365 Plantillas trabajo (H+M) PAG. 15
Ancha	Extra-confort en práctica de deportes cuando se requiere amortiguación especial para reducir los impactos (rodilla y cadera) de la pisada	CGF0362/CGF0363 Plantillas deporte (H+M) PAG. 15

Lesiones antepié



Durezas

Descripción patología: Engrosamiento de la capa más superficial de la piel del pie a causa de un aumento de células muertas y descamadas.

Síntomas: Piel endurecida sin bordes definidos. Color amarillento. Textura áspera al tacto. Sequedad. Generalmente no provocan dolor o molestia.

ComforSil

¿Tiene dolor que en ocasiones puede llegar a resultarle invalidante al caminar?

HORMA

Productos de silicona

Tratamiento

Ancha/Tacón

Al observar **durezas en la zona plantar superior** que molestan al caminar.

CC220
Almohadillas metatarsales con anillo de sujeción

PAG. 06

Estrecha/Punta

Durezas y dolor en la zona plantar. Necesidad de amortiguación al caminar en la zona endurecida.

CC225
Protectores de antepié Sin costuras

PAG. 07

Ancha/Estrecha

Durezas y sensación de cansancio en pies y piernas.

CC203
Plantillas pies y piernas cansadas

PAG. 09

ComforGel

¿Siente molestias que le dificultan caminar o usar algún tipo de calzado?

HORMA

Productos de gel

Prevención

Estrecha/Tacón

Al observar los **primeros síntomas de durezas**, suavizan el impacto de la pisada en la zona de los metatarsos. Ajuste textil.

CG1501
Protector plantar con almohadilla

PAG. 010

Ancha

Al observar los **primeros síntomas de durezas**, suavizan el impacto de la pisada. Ajuste con anillo.

CG0701 Almohadillas metatarsales con anillo de sujeción

PAG. 010

Pie abierto

Descripción patología: Dolor inespecífico y sensación similar a que el empeine o el antepié se ensancha.

Síntomas: Dolor de tipo mecánico: aparece cuando llevamos un rato caminando y desaparece casi por completo con el reposo.



ComforSil

¿Tiene dolor que en ocasiones puede llegar a resultarle invalidante al caminar?

HORMA

Productos de silicona

Tratamiento

Ancha

Dolor de antepié con **necesidad de sujeción del pie al caminar.**

CC229
Banda elástica con almohadilla

PAG. 07


Eficacia, resistencia y comodidad en silicona

ComforSil®



Comforsil® Soft Solution, mejora el diseño anatómico de los productos, el confort en su uso y su apariencia.

Un paso adelante más de la marca referente de productos de silicona para el cuidado de los pies.

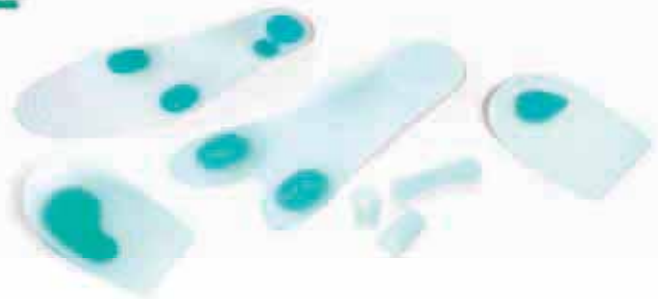

**100% confort.
Máxima flexibilidad
y adaptabilidad**



Productos de gel 100% puro, diseñados para proporcionar la máxima comodidad y flexibilidad protegiendo los pies allí donde se requiere un cuidado especial.

ComforGel®



COMFORSIL *Textiles Sin Costuras*
Protector plantar con almohadilla
CC256

MATERIAL: Poliamida / elastan / Silicona

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
S	800304	196294.2	x2
L	800303	196296.6	x2

CARACTERÍSTICAS

- Protector plantar confeccionado en suave tejido elástico y sin costuras.
- Cuenta con material antideslizante en la zona del empeine para evitar que se mueva durante su uso.
- Lleva en su interior una almohadilla de silicona extra blanda.



COMFORSIL
Almohadillas metatarsales
con anillo de sujeción
CC220

MATERIAL: Silicona

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
Única	800438	156336.1	x2

CARACTERÍSTICAS

- Almohadilla metatarsal de silicona. Se introduce el anillo en el 2º dedo con las figuras semiesféricas mirando hacia la planta del zapato. Estas figuras dotan de mayor adherencia a la órtesis y con su deformación, al caminar aumentan el nivel de amortiguación.



COMFORSIL *Textiles Sin Costuras*
Protectores de antepié con almohadilla
CC225

MATERIAL: Poliamida / elastan / Silicona

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
S	800271	162511.3	x2
L	800270	162545.8	x2

CARACTERÍSTICAS

- Protector del antepié anatómico, confeccionado en tejido elástico sin costuras.
- Cuenta con un material antideslizante en la zona del empeine para evitar que se mueva durante su uso. Contiene en su interior una almohadilla de silicona extra blanda que cubre desde la yema de los dedos hasta la zona del metatarso.



COMFORSIL
Banda elástica con almohadilla
CC229

MATERIAL: Poliamida y elastan / Silicona

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
S	800360	157910.2	x1
M	800359	157911.9	x1
L	800358	157912.6	x1

CARACTERÍSTICAS

- Banda de textil elástica con almohadilla metatarsal de silicona.



COMFORSIL
Miniplantillas descanso extrafinas
CC257

MATERIAL: Silicona

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
Única	800052	196297.3	x2

CARACTERÍSTICAS

- Miniplantillas de antepié de silicona, forma ergonómica con figuras semiesféricas que proporcionan agarre a la órtesis con el zapato y la dotan de mayor amortiguación durante su uso.



COMFORSIL
Miniplantillas descanso
extrafinas forradas
CCF401

MATERIAL: Silicona / Poliéster

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
Única	800064	267220.8	x2

CARACTERÍSTICAS

- Miniplantillas de antepié de silicona, forma ergonómica con figuras semiesféricas que proporcionan agarre a la órtesis con el zapato y la dotan de mayor amortiguación durante su uso.
- Está forrada en el área de contacto a la piel con una microfibra que absorbe el sudor del pie.



COMFORSIL
Plantillas con descargas anti-impacto
CC209

MATERIAL: Silicona

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
S (35 - 39)	800039	396952.9	x2
M (40 - 43)	800038	396960.4	x2
L (44 - 46)	800037	396978.9	x2

CARACTERÍSTICAS

- Plantilla de silicona con resaltes del primer y quinto metatarso para descarga de los metatarsos centrales, cuenta en esta zona con dos insertos de silicona de color verde oscuro que tienen una menor dureza para proporcionar un alivio de la presión en el área de mayor carga. Tiene también un resalte en la zona de apoyo del talón y otro inserto de silicona de menor dureza que otorga una amortiguación extra a la pisada y acompaña el recorrido de transición del pie.



COMFORSIL
Plantillas pies y piernas cansadas
CC203

MATERIAL: Silicona

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
S (35 - 39)	800014	1558077	x2
M (40 - 43)	800013	155808.4	x2
L (44 - 46)	800012	155809.1	x2

CARACTERÍSTICAS

- Plantilla de silicona de 3/4 con resaltes del primer y quinto metatarso para descarga de los metatarsos centrales, cuenta en esta zona con dos insertos de silicona de color verde oscuro que tienen una menor dureza para proporcionar un alivio de la presión en el área de mayor carga. Tiene también un resalte en la zona de apoyo del talón que otorga una amortiguación extra a la pisada y además cuenta con el arco plantar interno resaltado para dar un apoyo total a la planta en todo momento.



COMFORGEL
Protector plantar
con almohadilla
CG1501

MATERIAL: Poliamida / Elastane / 100% Gel polímero

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
S	736455	166463.1	x2
L	736454	166464.8	x2

CARACTERÍSTICAS

- Protector plantar con almohadilla de gel. Fabricado en tejido elástico.
- La tira de tejido se debe colocar entre el primer y segundo dedo.



COMFORGEL
Almohadillas metatarsales
con anillo de sujeción
CG0701

MATERIAL: 100% Gel polímero

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
S	736441	166438.9	x2
L	736440	166440.2	x2

CARACTERÍSTICAS

- Almohadilla metatarsal fabricada en gel que incorpora un anillo de sujeción para introducir el 2º dedo y evitar que se desplace.



COMFORGEL
Miniplantillas extrafinas
antideslizantes
CG0401

MATERIAL: 100% Gel polímero

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
Única	736448	166434.1	x2

CARACTERÍSTICAS

- Miniplantillas extrafinas fabricadas en gel. Incorporan figuras semiesféricas que proporcionan agarre a la órtesis con el zapato.



COMFORGEL
Pantillas extrafinas forradas
"All care"
CGF0370

MATERIAL: Gel polímero / tejido

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
S (35 - 38)	736451	164613.2	x2
M (39 - 42)	736450	164614.9	x2
L (43 - 46)	736449	164615.6	x2

CARACTERÍSTICAS

- Plantillas fabricadas en gel y forradas. Las zonas de descargas anti-impacto van engrosadas para evitar la presión en el talón y zona metatarsal.



ComforGel Lady

Plantillas gel-comfort para el calzado femenino.



Plantillas para todo tipo de calzado. Con identidad propia.

ComforGel[®] Plantillas

Confort para tus pies.



DEPORTE

DIARIO

TRABAJO

3 modelos para adaptarse mejor a tus pies y tus rutinas



COMFORGEL Lady
Plantillas tacones muy altos
CG0366

MATERIAL: Gel polímero

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
35-40	739078	195549.4	x2

CARACTERÍSTICAS

- Plantilla de gel con una morfología especial para adaptarse a zapatos altos, dando soporte de absorción de impactos y confort. Posee una serie de burbujas en relieve para dar un leve efecto masaje al caminar. La parte inferior de la plantilla tiene un alto TAC que hace que se pegue al calzado evitando que se mueva al caminar y que pueda provocar molestias.



COMFOGEL Lady
Plantillas tacones diarios
CG0367

MATERIAL: Gel polímero

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
35 - 40	739079	195548.7	x2

CARACTERÍSTICAS

- Plantilla de gel con una morfología especial para adaptarse a zapatos de tacón, dando soporte de absorción de impactos y confort. Posee una serie de burbujas en relieve para dar un leve efecto masaje al caminar, tiene el puente más alto de lo normal para adaptarse ergonómicamente al pie. La parte inferior de la plantilla tiene un alto TAC que hace que se pegue al calzado evitando que se mueva al caminar y que pueda provocar molestias.




COMFORGEL Lady
Plantillas zapatos abiertos
CG0368

MATERIAL: Gel polímero

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
35-40	739080	195547.0	x2

CARACTERÍSTICAS

• Plantilla de gel para zapatos abiertos y sandalias. Tiene una morfología especial para adaptarse a zapatos abiertos, dando soporte de absorción de impactos y confort. Son transparentes lo que proporciona un uso discreto. Posee una serie de burbujas en relieve para dar un leve efecto masaje al caminar. La parte inferior de la plantilla tiene un alto TAC que hace que se pegue al calzado evitando que se mueva al caminar y que pueda provocar molestias.

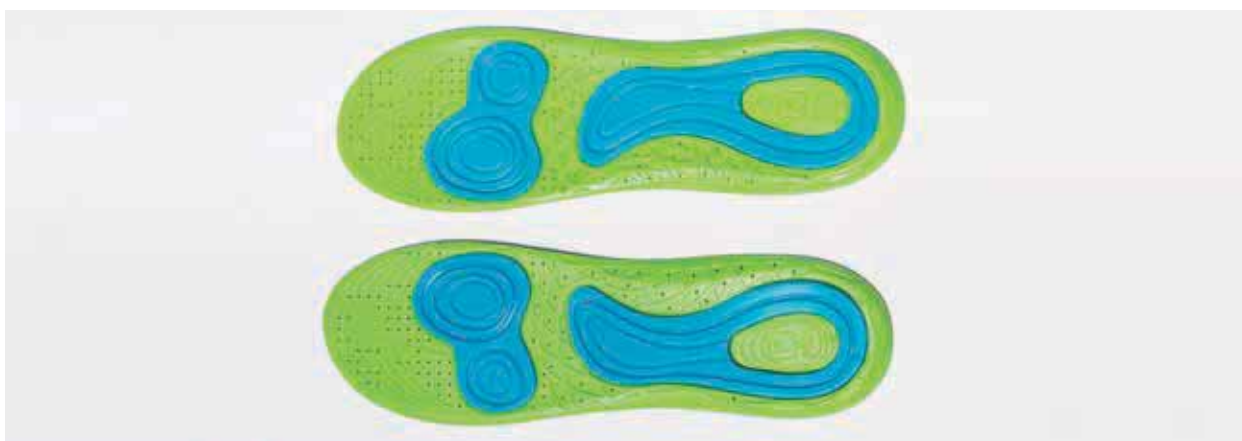

COMFORGEL
Plantillas uso diario
CGF0360 (H)/CGF0361 (M)

MATERIAL: Gel polímero / poliéster

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
40 - 46	737397	190752.3	x2
35 - 41	737398	190753.0	x2

CARACTERÍSTICAS

• Plantilla de uso diario. Es multitalla (recortable) y está compuesta de gel polímero que absorbe la tensión del peso del cuerpo en cada pisada, sin deformarse y forrada de microfibra. Con perforaciones que permiten la transpiración.



COMFORGEL
Plantillas trabajo


CGF0364 (H)/CGF0365 (M)

MATERIAL: PU Foam/ Gel polímero /TPU / Poliéster

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
40-46	737399	190754.7	x2
35-41	737400	190755.4	x2

CARACTERÍSTICAS

- Plantilla de uso laboral. Es multitalla (recortable) con cuerpo de espuma de poliuretano que aporta ligereza al diseño. Posee dos zonas de gel (en el talón y en la articulación metatarsal) que sirven para absorber los impactos de la pisada. Tiene perforaciones que permiten la transpiración.

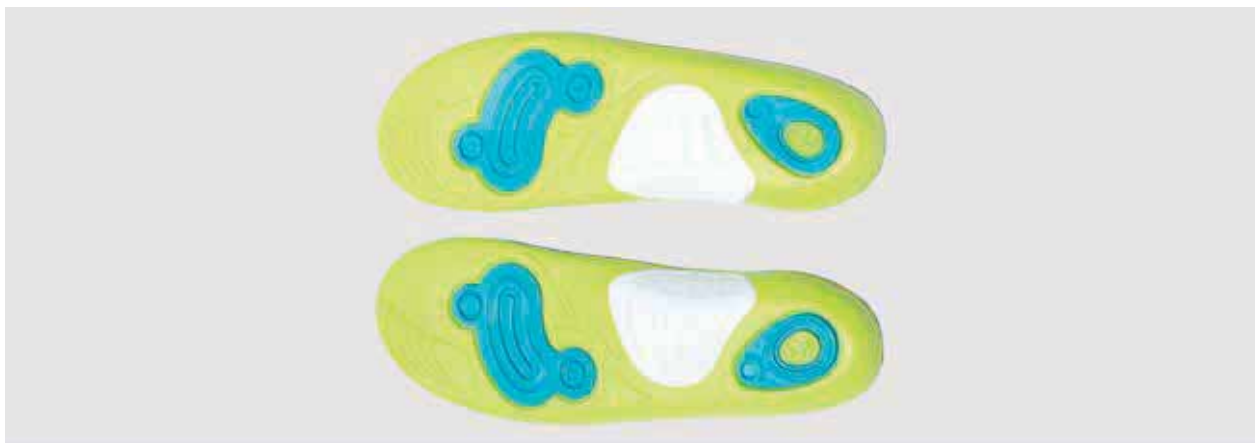

COMFORGEL
Plantillas deporte

CGF0362 (H)/CGF0363 (M)

MATERIAL: PU Foam/ Gel polímero /TPU / Poliéster

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
40 - 46	737395	190749.3	x2
35 - 41	737396	190750.9	x2

CARACTERÍSTICAS

- Plantilla de uso deportivo. Es multitalla (recortable) con cuerpo de espuma de poliuretano que aporta ligereza al diseño. Posee dos zonas de gel (en el talón y en la articulación metatarsal) que sirven para absorber los impactos de la pisada y tiene una pieza de termoplástico rígida en la zona del arco del pie que evita torsiones que pueden provocar lesiones.



Patologías talón

Espolón calcáneo
Tendinitis
Ampollas

Podología

Guía de Prevención
y Tratamiento
podológico
personalizado



Espolón calcáneo



Descripción patología: Pequeña formación ósea en el calcáneo, produciendo dolor en el talón del pie.

Síntomas: Dolores matutinos al dar los primeros pasos y punzantes que limitan la deambulación.

ComforSil

¿Tiene dolor que en ocasiones puede llegar a resultarle invalidante al caminar?

HORMA

Productos de silicona

Tratamiento

Estrecha

Dolor en el talón con necesidad de **no apoyar la zona del espolón sobre el calzado.**

CC215
Talonerías espolón con orificio desplazable

PAG. 06

Ancha

Dolor en el talón cuando se puede apoyar pero se necesita una zona más blanda para aliviar la presión al pisar.

CC212
Talonerías espolón con cazoleta

PAG. 06



Tendinitis

Descripción patológica: Lesión de un tendón que se caracteriza por la inflamación, irritación o hinchazón del mismo.

Síntomas: Dolor localizado al roce y a la presión, acompañado de inflamación, que se extiende en todo el trayecto tendinoso.

ComforSil

¿Tiene dolor que en ocasiones puede llegar a resultarle invalidante al caminar?

HORMA

Productos de silicona

Tratamiento

Ancha/Estrecha

Dolor en el talón por roce del contrafuerte sobre el talón.

CC213
Protector de talón
autoadhesivo

PAG.
07

Ancha/Estrecha

Dolor en el talón al caminar cuando se necesita amortiguación al caminar y un ajuste perfecto al zapato.

CC214
Taloneras descanso
antideslizantes

PAG.
07

Ancha/Estrecha

Dolor en el talón al caminar cuando se necesita amortiguación y evitar deslizamientos.

CCF214
Taloneras descanso
forradas

PAG.
08

ComforGel

¿Siente molestias que le dificultan caminar o usar algún tipo de calzado?

HORMA

Productos de gel

Prevención

Ancha/Estrecha

Al notar los primeros síntomas de molestias en el talón, se utilizan para suavizar los impactos sobre el mismo al caminar.

CG0501
Taloneras para descanso

PAG.
011

ComforGel Lady

¿Pasas mucho tiempo de pie y necesitas que tu calzado sea más cómodo?

HORMA

Productos de gel

Confort

Ancha

Necesidad de confort y absorción de impactos en talón, rodilla y tobillos

CG0369
Plantillas zapato plano

PAG.
011



Ampollas

Descripción patología: Lesión de la epidermis cutánea, con contenido líquido, como respuesta a una irritación de la piel en lugares de roce y presión del calzado.

Síntomas: Aparece una bolsa rellena de líquido carente de células hemáticas (suero) de color amarillento. Son causa de dolor y en ocasiones pueden llegar a ser incapacitantes.

ComforSil

¿Tiene dolor que en ocasiones puede llegar a resultarle invalidante al caminar?

HORMA

Productos de silicona

Tratamiento

Estrecha

Alivio de la presión sobre la ampolla para protegerla con el efecto amortiguador que proporciona la silicona.

CC329
Lámina de silicona recortable adherente

PAG.
08

Punta/Tacón

Alivio de la presión sobre la ampolla con textil fino.

CC249
Lámina de feltro recortable adherente

PAG.
09

Productos de silicona



ComforSil®

Comforsil® Soft Solution, mejora el diseño anatómico de los productos, el confort en su uso y su apariencia.

Un paso adelante más de la marca referente de productos de silicona para el cuidado de los pies.

Eficacia, resistencia y comodidad en silicona



COMFORSIL
Taloneras espolón
con orificio desplazable
CC215

MATERIAL: Silicona

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
S (34 - 37)	800190	161984.6	x2
M (38 - 40)	800189	162529.8	x2
L (41 - 43)	800188	161992.1	x2

CARACTERÍSTICAS

• Talonera de silicona con un ligero desnivel que transfiere la carga hacia la parte externa del pie para mayor alivio del área del espolón. Cuenta con un inserto extraíble de menor dureza que el resto de la talonera, aliviando de este modo las molestias ocasionadas por la aparición del espolón. Cuando se retira el inserto verde, permanece una fina membrana de silicona en el orificio que impide la aparición de edema de ventana.



COMFORSIL
Taloneras espolón con cazoleta
CC212

MATERIAL: Silicona

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
S (34 - 37)	800175	398628.1	x2
M (38 - 40)	800174	399170.4	x2
L (41 - 43)	800173	162032.3	x2

CARACTERÍSTICAS

• Talonera de silicona con cazoleta para evitar desplazamientos durante la marcha. Posee un inserto de silicona de menor dureza para aliviar la presión en el área de mayor presión de la pisada, además se extiende por todo el área de posible manifestación de la dolencia de espolón calcáneo.



COMFORSIL Protector de talón autoadhesivo CC213

MATERIAL: Silicona

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
Única	800250	162537.3	x4

CARACTERÍSTICAS

- Protector de talón de silicona con forma ergonómica que se adapta a la forma del tendón de Aquiles. Está cubierto en la zona de contacto con el zapato para conservar la adhesión de la silicona que ayuda a fijarlo, evitando su desplazamiento durante la marcha.



COMFORSIL Taloneras de descanso antideslizantes CC214

MATERIAL: Silicona

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
S (34-37)	800181	156226.5	x2
M(38 -40)	800180	156227.2	x2
L(41 - 43)	800179	156228.9	x2

CARACTERÍSTICAS

- Talonera que amortigua la carga del talón reduciendo así la presión sobre la planta del pie. Cuenta con una serie de semiesferas en la parte inferior que ayudan a fijar la talonera al calzado evitando así su desplazamiento durante el uso, además al deformarse ligeramente con la presión de la pisada, proporciona una mayor amortiguación al caminar.



COMFORSIL
Taloneras de descanso
antideslizantes forradas
CCF214

MATERIAL: Silicona

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
S (34-37)	800236	163011.7	x2
M(38 -40)	800235	163012.4	x2
L(41 - 43)	800234	163013.1	x2

CARACTERÍSTICAS

- Talonera forrada que amortigua la carga del talón reduciendo así la presión sobre la planta del pie. Cuenta con una serie de semiesferas en la parte inferior que ayudan a fijar la talonera al calzado evitando así su desplazamiento durante el uso, además al deformarse ligeramente con la presión de la pisada, proporciona una mayor amortiguación al caminar, cuenta también con un forro de microfibra que absorbe el sudor.



COMFORSIL
Lámina de silicona
recortable adherente "Aqua"
CC329

MATERIAL: Poliamida y elastan / Lycra/ Gel de silicona

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
9,5x9,5 cm	800608	161336.3	x1

CARACTERÍSTICAS

- Lámina recortable, lavable y reutilizable (hasta 25 lavados) sin pegamento.
- Grosor aproximado: 1,5mm.



COMFORSIL
Lámina de fieltro
recortable adherente
CC249

CARACTERÍSTICAS

- Lámina recortable con adhesivo hipoalergénico.

MATERIAL: Feltro / adhesivo

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
22x7 cm.	800357	157937.9	x1

Productos de gel

ComforGel

Productos de gel 100% puro, diseñados para proporcionar la máxima comodidad y flexibilidad protegiendo los pies allí donde se requiere un cuidado especial.

**100% confort.
Máxima flexibilidad
y adaptabilidad**



ComforGel Lady

Plantillas gel-confort para el calzado femenino.



Plantillas para todo tipo de calzado. Con identidad propia.



COMFORGEL
Taloneritas para descanso
CG0501

MATERIAL: 100% Gel polímero

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
Única	736469	166433.4	x2

CARACTERÍSTICAS

- Taloneritas de gel para descanso que reducen las cargas e impactos soportados por el tobillo, articulación de la cadera y columna vertebral.



COMFOGEL Lady
Plantillas zapatos planos
CG0369

MATERIAL: Gel polímero

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
35 - 40	739081	195546.3	x2

CARACTERÍSTICAS

- Plantilla diseñada con una morfología especial para adaptarse a zapatos planos, dando soporte de absorción de impactos y confort. Posee una serie de burbujas en relieve para dar un leve efecto masaje al caminar, tiene una pequeña cazoleta en la parte trasera que ayuda a evitar que la plantilla se desplace. La parte inferior de la plantilla tiene un alto TAC que hace que se pegue al calzado evitando que se mueva al caminar y que pueda provocar molestias.



Patologías planta

*Fascitis plantar
Hiperhidrosis
Dismetria*

Podología

**Guía de Prevención
y Tratamiento
podológico
personalizado**



Fascitis plantar

Descripción patología: Inflamación producida por un excesivo estiramiento de los músculos de la zona plantar.

Síntomas: El dolor es mecánico, puede ser unilateral o bilateral en la zona anterior al talón, fundamentalmente se agudiza el dolor tras el reposo.



ComforSil

¿Tiene dolor que en ocasiones puede llegar a resultarle invalidante al caminar?

Productos de silicona

Tratamiento

HORMA			
Ancha/Estrecha	Dolor localizado en la planta del pie con necesidad de amortiguación al caminar para evitar el impacto sobre la zona de la fascia.	CC209 Plantillas con descargas anti-impacto	PAG. 05
	Masaje de la fascia para aliviar el dolor muscular en la zona plantar.	CAR085 Pediroller	PAG. 06
Ancha/Estrecha	Dolor en planta del pie cuando se permanece mucho tiempo de pie.	CC203 Plantillas pies y piernas cansadas	PAG. 05
Punta	Molestias por sobrecarga en metatarsos, talón y zona plantar, forradas para evitar el deslizamiento.	CCF313 Plantillas extrafinas forradas	PAG. 06

ComforGel

¿Pasas mucho tiempo de pie y necesitas que tu calzado sea más cómodo?

Productos de gel

Confort

HORMA			
Ancha	Ayuda a mejorar la sensación de piernas cansadas y dolor de pies. Para uso diario	CGF0360/CGF0361 Plantillas diario (H+M)	PAG. 09
Ancha	Uso específico en calzado de trabajo para proporcionar descanso extra al permanecer mucho tiempo de pie	CGF0364/CGF0365 Plantillas trabajo (H+M)	PAG. 10
Ancha	Extra-confort en práctica de deportes cuando se requiere amortiguación especial para reducir los impactos (rodilla y cadera) de la pisada	CGF0362/CGF0363 Plantillas deporte (H+M)	PAG. 09



Hiperhidrosis

Descripción patología: Excesiva sudoración, debido a una actividad exagerada de las glándulas sudoríparas. Es más frecuente que esta sudoración excesiva se produzca en las regiones plantar e interdigital.

Síntomas: Si no se observan unas reglas de higiene estrictas, se produce a nivel de los espacios interdigitales, mal aireados, una maceración de la piel endureciéndose.



ComforSil

¿Tiene dolor que en ocasiones puede llegar a resultarle invalidante al caminar?

HORMA

Productos de silicona

Tratamiento

Ancha/Estrecha

Pies mojados y mal olor.

**CC297
Plantillas carbón total
"Odor Control"**

**PAG.
07**

Dismetria

Descripción patología: Diferencia de longitud de las extremidades.

Síntomas: Las más frecuentes son de 1,5cm no precisando tratamiento. Elegir el alza adecuado para compensar la pisada y evitar posibles lumbalgias. A partir de 1,5 hasta 4cm precisan tratamiento especializado.



ComforSil

¿Tiene dolor que en ocasiones puede llegar a resultarle invalidante al caminar?

HORMA

Productos de silicona

Tratamiento

Ancho

Colocada en la extremidad mas corta en caso de dismetria, reduce la diferencia de altura al caminar. También se pueden utilizar cuando se quiere ganar algo de altura.

**CC247
Alzas de silicona**

**PAG.
07**

Productos de silicona



ComforSil®

Comforsil® Soft Solution, mejora el diseño anatómico de los productos, el confort en su uso y su apariencia.

Un paso adelante más de la marca referente de productos de silicona para el cuidado de los pies.

Eficacia, resistencia y comodidad en silicona



COMFORSIL
Plantillas con descargas
anti-impacto
CC209

MATERIAL: Silicona

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
S (35 - 39)	800039	396952.9	x2
M (40 - 43)	800038	396960.4	x2
L (44 - 46)	800037	396978.9	x2

CARACTERÍSTICAS

- Plantilla de silicona con resaltes del primer y quinto metatarso para descarga de los metatarsos centrales, cuenta en esta zona con dos insertos de silicona de color verde oscuro que tienen una menor dureza para proporcionar un alivio de la presión en el área de mayor carga. Tiene también un resalte en la zona de apoyo del talón y otro inserto de silicona de menor dureza que otorga una amortiguación extra a la pisada y acompaña el recorrido de transición del pie.



COMFORSIL
Plantillas pies y piernas cansadas
CC203

MATERIAL: Silicona

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
S (35 - 39)	800014	1558077	x2
M (40 - 43)	800013	155808.4	x2
L (44 - 46)	800012	1558091	x2

CARACTERÍSTICAS

- Plantilla de silicona de 3/4 con resaltes del primer y quinto metatarso para descarga de los metatarsos centrales, cuenta en esta zona con dos insertos de silicona de color verde oscuro que tienen una menor dureza para proporcionar un alivio de la presión en el área de mayor carga. Tiene también un resalte en la zona de apoyo del talón que otorga una amortiguación extra a la pisada y además cuenta con el arco plantar interno resaltado para dar un apoyo total a la planta en todo momento.



COMFORSIL
Plantillas extrafinas forradas
CCF313

MATERIAL: Silicona / Poliéster

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
S (35 - 36)	800136	153667.9	x2
M (37 - 38)	800135	153669.3	x2
L (39 - 40)	800134	153670.9	x2
XL (41 - 42)	800137	156294.4	x2

CARACTERÍSTICAS

- Su alta fijación evita que se mueva en el zapato. Puede recortarse la punta. Al lavarlas recuperan toda su adherencia.



COMFORSIL
Pediroller
CAR085

MATERIAL: Silicona

C.Interno	C.Nacional	Contenido
807480		x1

CARACTERÍSTICAS

- Cilindro estriado que masajea los pies cansados, reduciendo la tensión y favoreciendo la circulación. Puede utilizarse como terapia de frío enfriándolo o congelándolo antes de su uso.



COMFORSIL
Plantillas carbón total
CC297

MATERIAL: Poliéster / Carbón / Espuma

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
Única	800547	177215.2	x2

CARACTERÍSTICAS

- Plantillas con 3 capas:
 - 1ª capa con tejido de poliéster 100% (rojo).
 - 2ª capa con alto contenido de carbón (12,5%) que absorbe el sudor y neutraliza el mal olor.
 - 3ª capa de espuma sintética (gris).
- Recortables del nº 35 al nº 45



COMFORSIL
Alzas de silicona
CC247

MATERIAL: Silicona

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
S (3mm)	800453	157932.4	x2
M (5mm)	800452	157934.8	x2
L (8mm)	800451	157935.5	x2

CARACTERÍSTICAS

- Alzas de silicona con distintas medidas de altura.



ComforGel

Plantillas




DEPORTE

DIARIO

TRABAJO

Confort para tus pies.

3 modelos para adaptarse mejor a tus pies y tus rutinas

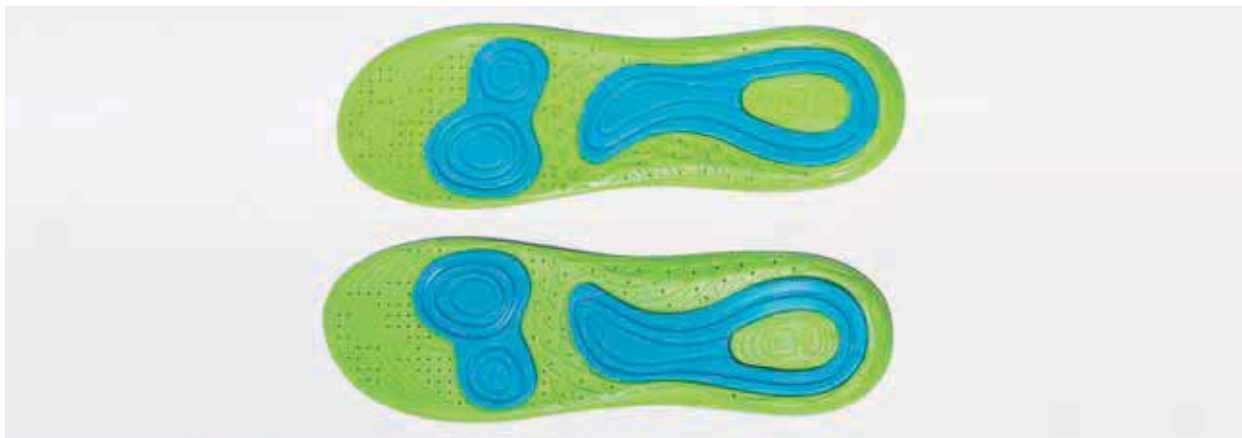

COMFORGEL
Plantillas uso diario

CGF0360 (H)/CFG0361 (M)

MATERIAL: Gel polímero / poliéster

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
40 - 46	737397	190752.3	x2
35 - 41	737398	190753.0	x2

CARACTERÍSTICAS

- Plantilla de uso diario. Es multitalla (recortable) y está compuesta de gel polímero que absorbe la presión del peso del cuerpo en cada pisada sin deformarse. Forrada de microfibra. Con perforaciones que permiten la transpiración.



COMFORGEL
Plantillas deporte

CGF0362 (H)/CGF0363 (M)

MATERIAL: PU Foam/ Gel polímero / TPU / Poliéster

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
40 - 46	737395	190749.3	x2
35 - 41	737396	190750.9	x2

CARACTERÍSTICAS

- Plantilla de uso deportivo. Es multitalla (recortable) con cuerpo de espuma de poliuretano que aporta ligereza al diseño. Posee dos zonas de gel (en el talón y en la articulación metatarsal) que sirven para absorber los impactos de la pisada y tiene una pieza de termoplástico rígida en la zona del arco del pie que evita torsiones que pueden provocar lesiones.



COMFORGEL
Plantillas trabajo

CGF0364 (H)/CGF0365 (M)

MATERIAL: PU Foam/ Gel polímero /TPU /Poliéster

Tallaje	C.Interno	C.Nacional	Contenido
40-46	737399	190754.7	x2
35-41	737400	190755.4	x2

CARACTERÍSTICAS

- Plantilla de uso laboral. Es multitalla (recortable) con cuerpo de espuma de poliuretano que aporta ligereza al diseño. Posee dos zonas de gel (en el talón y en la articulación metatarsal) que sirven para absorber los impactos de la pisada. Tiene perforaciones que permiten la transpiración.

Podología


**Guía de Prevención
y Tratamiento**
*podológico
personalizado*

PRIM contribuye de manera decisiva a la formación de los profesionales sanitarios a través de las **Guías de Tratamiento personalizado**. Esta nueva **Guía de Podología**, le ayudará a recomendar soluciones a las preguntas más comunes de sus pacientes, para el tratamiento o atenuación de las patologías más frecuentes de los pies.



PRIM S.A.

Yolanda González, 15
(Antigua Calle F)
Polígono Industrial nº 1
28938 Móstoles. Madrid

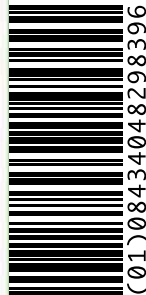

Artículo: 739672

www.prim.es